


Produktblad Näringspreparat med tillbehör

Contact amningsvårtskydd

- ✓ För tillfälligt bruk vid amning med ömmande, spruckna eller plana bröstvårtor.
- ✓ Utskuren del så att barnet känner mammans hud och doft under amningen.
- ✓ Tillverkad av tunn, mjuk silikon.
- ✓ Finns i tre storlekar; Small, Medium och Large.

Innan applicering av amningsnappen, se till att den utskurna delen är vänd åt det håll där barnets näsa kommer att vara under amningen.

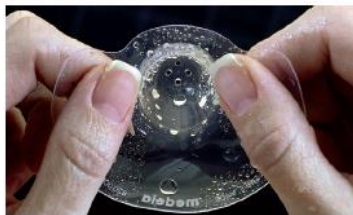

Fukta kanterna på amningsnappen med vatten för att vara säker på att den kommer att sitta tätt mot huden.



Vänd amningsnappen ut och in till hälften, likt en "mexikansk hatt".



Greppa tag om vingarna på amningsnappen.



Täck över hålen med långfingret.



Håll kvar långfingret över hålen så vakuum bildas. Dra samtidigt i vingarna tills amningsnappen av sig självt vänds tillbaka i ursprungsläget.



Bröstvårtan fyller nu nästan ut hela amningsnappen. Barnet får nu ett stort tag om bröstvårtan och suger inte bara på yttersta delen av amningsnappen.

800.0572	Contact amningsvårtskydd, small 16 mm	Silikon	CE-märkt
200.1688	Contact amningsvårtskydd, medium 20 mm	Silikon	CE-märkt
800.0573	Contact amningsvårtskydd, large 24 mm	Silikon	CE-märkt