

Suprasorb® X

Cellulosaförband med vatten
Bruksanvisning




Suprasorb® X består av:

- cellulosa
- vatten
- 0,085% klorhexidinglukonat

Suprasorb® X

- frisätter fukt
 - absorberar överflödigt vätska
 - eller båda - samtidigt
- efter behov i varje enskilt fall

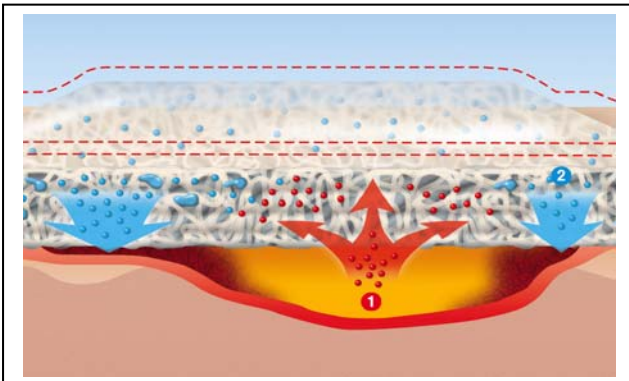

1. Överflödigt sårsekret tas upp från såret och in i förbandet.
2. Fukt frisätts från förbandet till det torra eller lätt vätskande sårområdet

Ett lämpligt sekundärförband (t.ex. Suprasorb® F, Suprasorb® P) ger extra stöd åt den reglerande effekten av absorptionen och/eller frisättningen av vätska.

Suprasorb® X produkterna är de enda sårförbanden som kan absorbera och frisätta fukt, efter behov, samtidigt och oberoende.

Suprasorb X®

- det enda sårförbandet som reglerar fukt efter behov

Hydrobalans - Samtidig absorption och rehydrering

Suprasorb® X är en unik kompress som har förmåga att "känna av" sårets status, dvs. om det behövs tillföras fukt eller absorberas överflödigt vätska. Detta kan ske oberoende eller båda samtidigt, efter behov i varje enskilt fall.

Kompressen består av cellulosa i flera lager, samt vatten. Den är mjuk och elastisk och formar sig efter sårets konturer samtidigt som den är stabil i sin struktur.

Suprasorb® X - kontrollerar fuktbalansen:

- i sår som är torra och lätt till måttligt vätskande
- i torra, nekrotiska sår
- i alla faser av sårläggningen
- i djupa och ytliga sår

Suprasorb® X - lindrar smärtan effektivt

Kliniska studier visar att Suprasorb® X:

- reducerar smärtan genom fuktreglering -HydroBalance
- har en behagligt kylande effekt
- har en lindrande och lugnande effekt på omgivande hud runt såret

Sterilförpackade kompresser samt tamponad band, individuellt förpackade.

Pos.	Prod.grupp	Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
		5x5 cm	20 534	5	90
		9x9 cm	20 531	5	80
		14x20 cm	20 532	5	65
		2x21cm, tamponad	20 533	5	130

Suprasorb® X – Indikationer

Icke -infekterade sår som är:

- torra eller lätt till måttligt vätskande
- ytliga eller djupa

t.ex.

- arteriella och venösa sår
- trycksår
- diabetessår
- 2:e gradens brännskador
- post-operativa sår
- hud donator / transplantat områden

Kontraindikation:

- 3:e gradens brännskador



Bruksanvisning



1. Rengör såret enligt gängse rutiner och torka därefter sårområdet torrt och omsorgsfullt med sterila sårkompresser.



2. Applicera Suprasorb® X på såret och forma efter såret. Ifall en tamponad används ska tamponaden vikas flera gånger och appliceras löst i sårhålan.



3. Fixera med lämpligt sekundärförband beroende på mängden exsudat: vid icke-infekterade sår använd Suprasorb® X med t.ex. Suprasorb® F, Suprasorb® P eller Vliwazell®.

Applicering av förbandet:

- Förbandets storlek beror på sårets storlek, överlappa såret med 2-3 cm.
- Öppna den sterila påsen och ta ut förbandet. Ta bort skyddsfilmerna på båda sidor. Endera sidan av förbandet appliceras på såret
- Vid behov kan förbandet och tamponaden klippas till i rätt storlek med en steril sax. Placera förbandet på såret, jämna ut det och fixera med lämpligt sekundärförband (t ex Suprasorb® F sårfilm, Suprasorb® P polyuretanförband eller Vliwazell® abs förband).

Byte av förband:

Hur ofta Suprasorb® X Hydrobalans sårförband/tamponad ska bytas bestäms av ansvarig läkare beroende på sårets läkningsfas.

Förbandet kan sitta upp till 7 dagar.

- Ta bort sekundärförbandet
- Ta försiktigt bort Suprasorb® X Hydrobalans sårförband/tamponad genom att lyfta ena hörnet och försiktigt dra bort förbandet från såret alternativt dra försiktigt bort Suprasorb® X Hydrobalans tamponad från såret.
- Kasta förbandet eller tamponaden.
- Rengör såret innan nytt förband eller ny tamponad appliceras.

Försiktighetsåtgärder:

Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om något av följande inträffar:

- Tecken på infektion, såret ändrar färg och/eller lukt
- Sår läkningen avstannar
- Överkänslighet mot förbandet eller andra oväntade symtom

Om förbandet har torkat:

Förbandet ska hållas fuktigt och kan då sitta upp till 7 dagar. Välj lämpligt sekundärförband beroende på hur mycket såret vätskar. Om förbandet ändå har torkat, återfukta det med NaCl.

"Washing effect":

När man har lyft på förbandet kan huden runt såret ha en vitaktig beläggning, som består av döda hudepitelceller. Anledningen är att förbandet tvättar huden runt såret och lyfter upp de döda hudepitelcellerna. Efter rengöring ser man intakt och slät hud.

Förbandsbyte

Suprasorb® X: en blåsa byggs upp i sårområdet

Kompressen har återfuktat huden runt såret och blir pergamentliknande

Halvtransparent – visuell inspektion av såret är möjlig



Kompressen skall bytas tidigare

Suprasorb® X kompressen har torkat ut och återfuktning bör ske innan avlägsnande.



"Washing effect"

Innan sårrengöring:

Vitaktig beläggning på huden runt såret



Efter sårrengöring:

Epitelvävnaden är intakt



Suprasorb[®] X
Cellulosaförband med vatten
Bruksanvisning

