


Milex™ Ringar

För prolaps och inkontinens

- Högkvalitativ medicinskt graderad silikon
- Snabba leveranser från eget lager i Sverige
- Utbildningsmaterial till vårdpersonal och patienter
- Våra produktspecialister stöttar er med produktutbildning

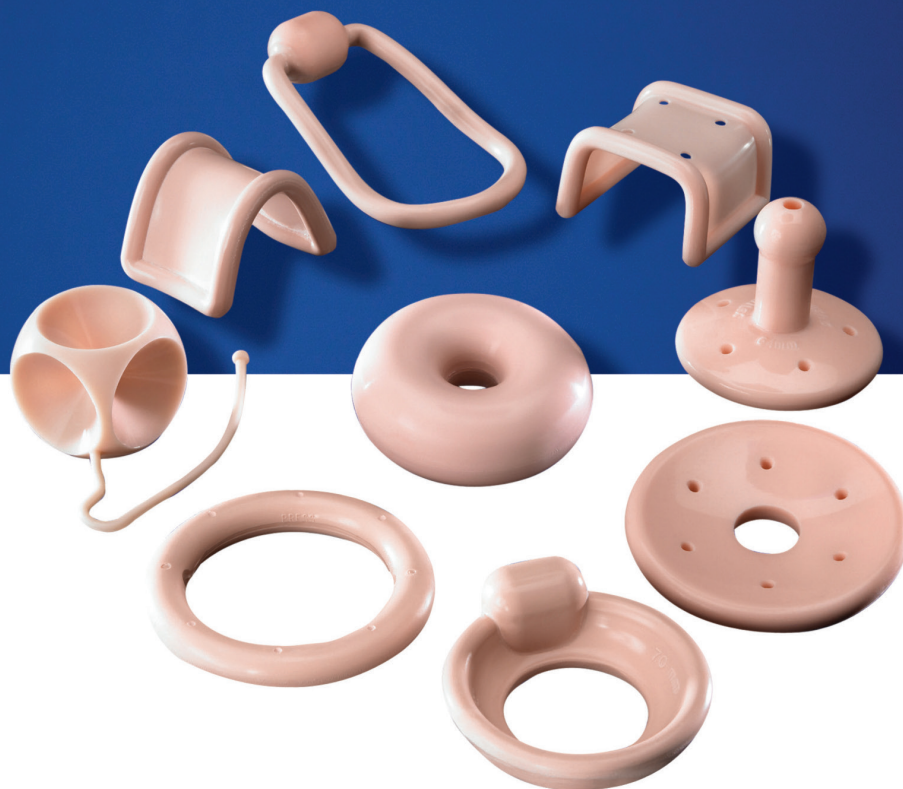

Milex™ ringar är det första och oftast det bästa valet för kvinnor med prolaps eller inkontinens som vill undvika, har kontraindikationer eller väntar på ett kirurgiskt ingrepp.

Den perfekta ickeinvasiva lösningen för prolaps och ansträngningsinkontinens

Milex™ ringar är ett säkert och effektivt hjälpmedel vid en mängd gynekologiska problem, inklusive defekt bäckenstöd och ansträngningsinkontinens. Prolapsringar är framtagna för att repositionera organ och därmed återställa kvinnors livskvalitet. Milex™ ringar är marknadsledande med en mängd olika konfigurationer och modeller för att optimera varje kvinnas behov.

Utprovning av ringar - en process

Utifrån tester med olika storlekar och modeller av utprovningsringar samt genom en komplett bäckenbottenundersökning säkerställer utprovaren att valet av Milex ring blir rätt för varje enskild patient.

Målet med utprovningen är att säkerställa att ringen uppfyller patientens behov och inte känns när den är på plats. Det är även viktigt att patienten får den information och hjälp som krävs för att hantera ringen på rätt sätt. Vår rekommendation är att utbilda varje patient på införande och uttag av ringen.

I utprovningsväskan ingår de vanligaste storlekarna och varianterna. Detta underlättar utprovning och rätt beslut vid val av Milex ring. De som ingår är Ring, Kub, Donut, Gellhorn och Disk i de vanligaste storlekarna.
Art nr. MXFIT-CA



Art nr.	Beskrivning	Prolaps					Ansträngningsinkontinens	Odefinierad symfys	Inkompetent cervix	Liten introitus	Vanligaste storlekarna	Material	Hur lätt man sätter in och tar ut dem	Sexuell aktivitet
		Uterus prolaps			Cystocele	Rectocele								
		Lätt prolaps	Svår prolaps	Total prolaps										
MXPER	 Ring	X								57-83 mm	Silikon & nylon*	Lätt/Medium	X	
MXPERK	 Ring med knapp	X				X				57-83 mm	Silikon & nylon**	Lätt/Medium	X	
MXPRS	 Ring med membran	X			X					57-83 mm	Silikon & nylon*	Lätt/Medium	X	
MXPRSK	 Ring med membran och knapp	X			X	X				57-83 mm	Silikon & nylon**	Lätt/Medium	X	
MXPCON	 Inkontinensring					X			X	57-83 mm	Silikon & metall	Lätt	X	
MXPSH	 Shaatz		X		X					57-83 mm	Silikon	Medium	X	
MXPCOND	 Inkontinensdisk	X				X				64-79 mm	Silikon	Medium	X	
MXPCONDS	 Inkontinensdisk med membran	X			X	X				64-79 mm	Silikon	Medium	X	
MXPGE	 Gellhorn, lång stam		X							57-76 mm	Silikon	Medium		
MXPGSS	 Gellhorn, kort stam		X							57-76 mm	Silikon	Medium		
MXPDO	 Donut			X	X	X				57-83 mm	Silikon	Svårt		
MXPREG	 Regula	X					X			32-38 mm	Silikon & metall	Medium	X	
MXPEH	 Hodge	X							X	83-114 x 57-67 mm	Silikon & metall	Lätt	X	
MXPHS	 Hodge med membran	X			X				X	83-114 x 57-67 mm	Silikon & metall	Lätt	X	
MXPEHK	 Hodge med knapp	X				X			X	83-114 x 57-67 mm	Silikon & metall	Lätt	X	
MXPHSK	 Hodge med knapp o membran	X			X	X			X	83-114 x 57-67 mm	Silikon & metall	Lätt	X	
MXPRI	 Risser								X	89-108 x 57-67 mm	Silikon & metall	Medium	X	
MXPES	 Smith								X	89-114 x 57-67 mm	Silikon & metall	Medium	X	
MXPECH	 Kub, med dränagehål			X	X	X	X			35-44 mm	Silikon	Svårt		
MXPEC	 Kub			X	X	X	X			35-44 mm	Silikon	Svårt		
MXPECT	 Tandemkub			X	X	X	X			35-44 mm	Silikon	Svårt		
MXPGS	 Gehrung		X		X	X				35-44 x 51-61 mm	Silikon & metall	Svårt	X	
MXPGSK	 Gehrung med knapp		X		X	X	X			35-44 x 51-61 mm	Silikon & metall	Svårt	X	
MXPINF	 Inflatoball			X	X	X				57-64 mm	Latex	Lätt		
CA	 Arabin, operererad						X	X			Silikon	Medium		
ASQ	 Arabin, perforerad						X	X			Silikon	Medium		

Viktigt: Ringar som innehåller metall ska avlägsnas före MRI.

* Storlek 9 och större innehåller metall

** Storlek 11 och större innehåller metall



MILEX™ RINGAR

Lätt prolaps

Ring

För lätt prolaps.

Art nr. MXPER

P



Ring	
Art nr.	mm
MXPER00	44
MXPER01	51
MXPER02	57
MXPER03	64
MXPER04	70
MXPER05	76
MXPER06	83
MXPER07	89
MXPER08	95
MXPER09	102
MXPER10	108
MXPER11	114
MXPER12	121
MXPER13	127

Ring med membran

För lätt prolaps med mild cystocele.

Art nr. MXPRS

P



Ring med membran	
Art nr.	mm
MXPRS00	44
MXPRS01	51
MXPRS02	57
MXPRS03	64
MXPRS04	70
MXPRS05	76
MXPRS06	83
MXPRS07	89
MXPRS08	95
MXPRS09	102
MXPRS10	108
MXPRS11	114
MXPRS12	121
MXPRS13	127

Ring med knapp

För lätt prolaps med ansträngningsinkontinens.

Art nr. MXPERK

P I



Ring med knapp	
Art nr.	mm
MXPERK00	44
MXPERK01	51
MXPERK02	57
MXPERK03	64
MXPERK04	70
MXPERK05	76
MXPERK06	83
MXPERK07	89
MXPERK08	95
MXPERK09	102
MXPERK10	108
MXPERK11	114
MXPERK12	121
MXPERK13	127

Ring med membran och knapp

För lätt prolaps med cystocele och ansträngningsinkontinens.

Art nr. MXPRSK

P I



Ring med knapp och membran	
Art nr.	mm
MXPRSK00	44
MXPRSK01	51
MXPRSK02	57
MXPRSK03	64
MXPRSK04	70
MXPRSK05	76
MXPRSK06	83
MXPRSK07	89
MXPRSK08	95
MXPRSK09	102
MXPRSK10	108
MXPRSK11	114
MXPRSK12	121
MXPRSK13	127



MILEX™ SHAATZ & KONTINENS

Lätt/svår prolaps och/eller inkontinens

Shaatz

För lätt/svår prolaps med mild cystocele.

Art nr. MXPSH

P



Shaatz	
Art nr.	mm
MXPSH1-1/2	38
MXPSH1-3/4	44
MXPSH2-	51
MXPSH2-1/4	57
MXPSH2-1/2	64
MXPSH2-3/4	70
MXPSH3-	76
MXPSH3-1/4	83
MXPSH3-1/2	89
MXPSH3-3/4	95

Inkontinensdisk med membran

För ansträngningsinkontinens med lätt prolaps och cystocele.

Art nr. MXPCONDS

P I



Inkontinensdisk med membran	
Art nr.	mm
MXPCONDS00	55
MXPCONDS01	60
MXPCONDS02	65
MXPCONDS03	70
MXPCONDS04	75
MXPCONDS05	80
MXPCONDS06	85

Inkontinensring

För ansträngningsinkontinens.

Art nr. MXPCON

I



Inkontinensring	
Art nr.	mm
MXPCON00	44
MXPCON01	51
MXPCON02	57
MXPCON03	64
MXPCON04	70
MXPCON05	76
MXPCON06	83
MXPCON07	89
MXPCON08	95
MXPCON09	102
MXPCON10	108
MXPCON11	114
MXPCON12	121
MXPCON13	127

Inkontinensdisk

För ansträngningsinkontinens med lätt prolaps.

Art nr. MXPCOND

P I



Inkontinensdisk	
Art nr.	mm
MXPCOND00	55
MXPCOND01	60
MXPCOND02	65
MXPCOND03	70
MXPCOND04	75
MXPCOND05	80
MXPCOND06	85

P = Prolaps

I = Inkontinens

Notera: Ljusrosa färgmarkering i tabellerna visar de vanligaste storlekarna. Dessa bör finnas på mottagningen och passar till cirka 85% av alla patienter.



MILEX™ HODGE

Liten introitus

Hodge

För mild prolaps hos kvinnor med liten introitus.

Art nr. MXPEH

Hodge med membran

För mild prolaps med cystocele hos kvinnor med liten introitus.

Art nr. MXPHS

Hodge med knopp

För mild prolaps med ansträngningsinkontinens hos kvinnor med liten introitus.


Art nr. MXPEHK

Hodge med membran och knopp

För mild prolaps med ansträngningsinkontinens och cystocele hos kvinnor med liten introitus.

Art nr. MXPHSK


P

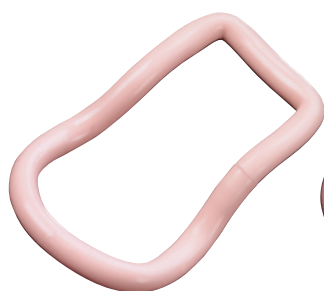



P



PI

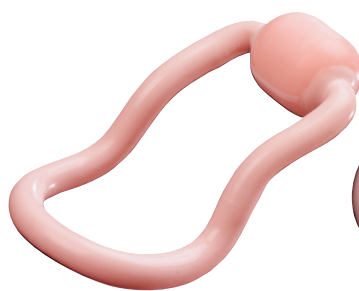

PI

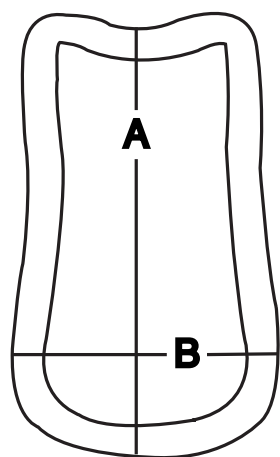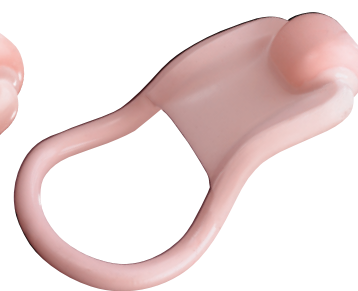

Hodge					
Hodge	Med membran	Med knopp	Med knopp o membran		
Art nr.	Art nr.	Art nr.	Art nr.	mm (A)	mm (B)
MXPEH00	MXPHS00	MXPEHK00	MXPHSK00	70	44
MXPEH01	MXPHS01	MXPEHK01	MXPHSK01	76	48
MXPEH02	MXPHS02	MXPEHK02	MXPHSK02	83	49
MXPEH03	MXPHS03	MXPEHK03	MXPHSK03	89	51
MXPEH04	MXPHS04	MXPEHK04	MXPHSK04	92	54
MXPEH05	MXPHS05	MXPEHK05	MXPHSK05	95	57
MXPEH06	MXPHS06	MXPEHK06	MXPHSK06	98	60
MXPEH07	MXPHS07	MXPEHK07	MXPHSK07	108	64
MXPEH08	MXPHS08	MXPEHK08	MXPHSK08	117	67
MXPEH09	MXPHS09	MXPEHK09	MXPHSK09	127	70



ARABIN, RISSER & SMITH

Inkompetent cervix

Arabin ringar med och utan dränagehål

Stöd vid risk för tidig förlösning på grund av inkompetent cervix. Ringen fästes runt livmodertappen. Den kan fästas när som helst under graviditeten och är ett alternativ till cerclage.

Art nr. ASQ



Art nr. CA




Perforerad	Operforerad	Yttre	Längd	Inre
Art nr.	Art nr.	mm	mm	mm
ASQ-65-17-32	CA-65-17-32	65	17	32
ASQ-65-17-35	CA-65-17-35	65	17	35
ASQ-65-21-32	CA-65-21-32	65	21	32
ASQ-65-21-35	CA-65-21-35	65	21	35
ASQ-65-25-32	CA-65-25-32	65	25	32
ASQ-65-25-35	CA-65-25-35	65	25	35
ASQ-65-30-35	CA-65-30-35	65	30	35
ASQ-70-17-32	CA-70-17-32	70	17	32
ASQ-70-17-35	CA-70-17-35	70	17	35
ASQ-70-21-32	CA-70-21-32	70	21	32
ASQ-70-21-35	CA-70-21-35	70	21	35
ASQ-70-25-32	CA-70-25-32	70	25	32
ASQ-70-25-35	CA-70-25-35	70	25	35

Risser

Framtagen för patienter med odefinierbart pubisben. Den har större vikt bärande zon mot pubis. Kan hjälpa kvinnor efter multipla missfall som beror på en inkompetent cervix, genom att repositionera vikten hos det växande fostret.


Art nr. MXPRI

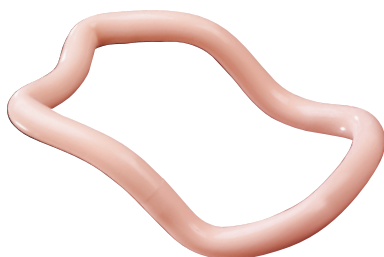

Smith

En modifierad Hodge båge. För ansträngningsinkontinens hos patienter med ett väldefinierat pubisben. Kan hjälpa kvinnor efter multipla missfall pga en inkompetent cervix, genom att repositionera vikten hos det växande fostret.

Art nr. MXPES

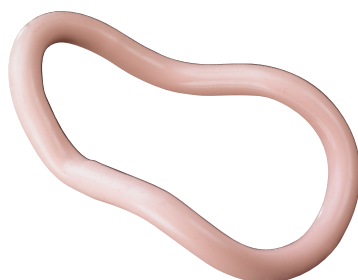

Risser	Smith	Storlek	
Art nr.	Art nr.	mm (A)	mm (B)
MXPRI00	MXPES00	79	51
MXPRI01	MXPES01	83	54
MXPRI02	MXPES02	89	57
MXPRI03	MXPES03	95	60
MXPRI04	MXPES04	108	64
MXPRI05	MXPES05	114	67
MXPRI06	MXPES06	121	70
MXPRI07	MXPES07	127	73
MXPRI08	MXPES08	140	76
MXPRI09	MXPES09	146	79



MILEX™ GELLHORN & DONUT

Svår prolaps

Gellhorn, lång stam

För svår prolaps. Bra för patienter som enbart har uterusprolaps.

Lättare att sätta in och ta ut än Donut.

Art nr. MXPGE

P



Gellhorn lång stam	
Art nr.	mm
MXPGE38	38
MXPGE44	44
MXPGE51	51
MXPGE57	57
MXPGE64	64
MXPGE70	70
MXPGE76	76
MXPGE83	83
MXPGE89	89
MXPGE95	95

Gellhorn, kort stam

För svår prolaps. Bra för patienter som enbart har uterusprolaps. Lättare att sätta in och ta ut än Donut.

Art nr. MXPSS

P



Gellhorn kort stam	
Art nr.	mm
MXPSS38	38
MXPSS44	44
MXPSS51	51
MXPSS57	57
MXPSS64	64
MXPSS70	70
MXPSS76	76
MXPSS83	83
MXPSS89	89
MXPSS95	95

Donut

För total prolaps. En utfyllnadsring som fyller ut hela vaginan. Ska inte pressas ihop eller tömmas på luft vid insättning då det försvårar uttag. Använd Inflatoboll vid behov av en uppblåsbar donut.

Art nr. MXPDO

P



Donut	
Art nr.	mm
MXPDO00	51
MXPDO01	57
MXPDO02	64
MXPDO03	70
MXPDO04	76
MXPDO05	83
MXPDO06	89
MXPDO07	95

Inflatoball™

För total prolaps. Kan pumpas upp till önskad storlek, pumpen kan sedan tas bort och luften stannar i ringen. Kan sedan tömmas vid uttag.

Innehåller latex.

Art nr. MXPINF

P



Inflatoball	
Art nr.	mm
MXPINF5	51
MXPINF7	57
MXPINF9	64
MXPINF15	70



MILEX™ KUBER

Total prolaps

Kub med dränagehål

Stöd vid total prolaps med cystocele och rectocele. Denna variant föredras framför andra kuber då den har dränagehål men hålen försämrar vakuomet och den sitter därav inte kvar lika bra.

Tas ut nattetid.

Art nr. MXPECH




Kub med dränagehål	
Art nr.	mm
MXPECH00	25
MXPECH01	30
MXPECH02	35
MXPECH03	38
MXPECH04	41
MXPECH05	44
MXPECH06	51
MXPECH07	57

Kub

Stöd vid total prolaps med cystocele och rectocele. Bättre vakuum än kub med dränagehål.

Tas ut nattetid.

Art nr. MXPEC

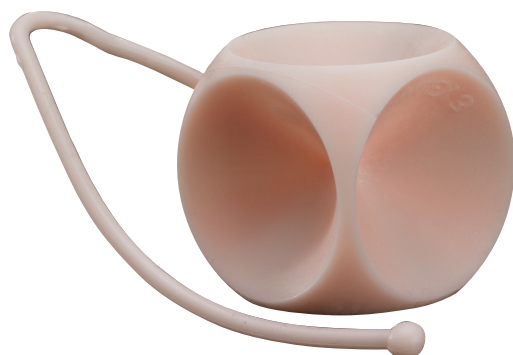


Kub utan dränagehål	
Art nr.	mm
MXPEC00	25
MXPEC01	30
MXPEC02	35
MXPEC03	38
MXPEC04	41
MXPEC05	44
MXPEC06	51
MXPEC07	57

Tandemkub


Stöd vid total prolaps, om slidan är lång behövs stöd hela vägen. Denna variant håller upp vid total prolaps med cystocele och rectocele.

Tas ut nattetid

Art nr. MXPECT

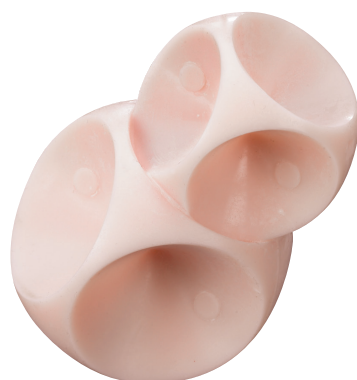

Tandemkub	
Art nr.	mm
MXPECT2-0	35 & 25
MXPECT3-1	38 & 30
MXPECT4-2	41 & 35
MXPECT5-3	44 & 38
MXPECT6-4	51 & 41
MXPECT7-5	57 & 44

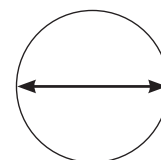

Mät tvärs över för ytterdiameter



MILEX™ GEHRUNG

Cystocele och/eller rectocele

Gehrung

För cystocele med eller utan rectocele. Ett bra alternativ när uterus tenderar till bräckbildning med andra ringar.

Art nr. MXPGS

P





Gehrung med knapp

För cystocele med eller utan rectocele komplicerad utav ansträngningsinkontinent. Ett bra alternativ när uterus tenderar till bräckbildning med andra ringar.

Art nr. MXPGSK

PI

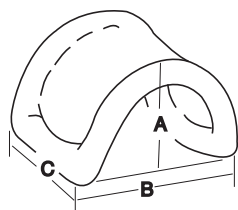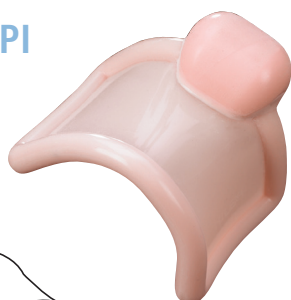

Gehrung	Gehrung med knapp			
Art nr.	Art nr.	mm (A)	mm (B)	mm (C)
MXPGS00	MXPGSK00	27	38	35
MXPGS01	MXPGSK01	29	44	38
MXPGS02	MXPGSK02	35	51	41
MXPGS03	MXPGSK03	38	54	44
MXPGS04	MXPGSK04	41	57	48
MXPGS05	MXPGSK05	44	60	51
MXPGS06	MXPGSK06	48	64	54
MXPGS07	MXPGSK07	51	73	57
MXPGS08	MXPGSK08	54	76	60
MXPGS09	MXPGSK09	57	79	64

MILEX™ REGULA



Odefinierad symfys

Regula

För uterusprolaps. Bra när andra ringar åker ut på grund av att patienten inte har ett väldefinierat pubisben att fästa ringen mot.

Art nr. MXPREG

P

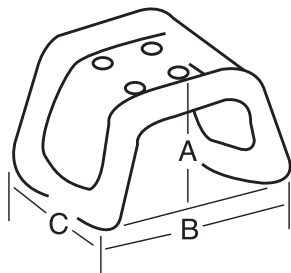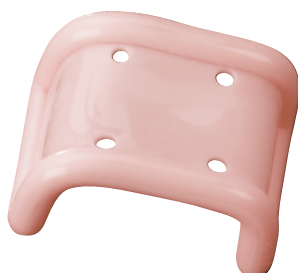

Regula båge			
Art nr.	mm (A)	mm (B)	mm (C)
MXPREG00	25	49	35
MXPREG01	27	51	38
MXPREG02	29	54	41
MXPREG03	32	56	44
MXPREG04	35	57	48
MXPREG05	37	60	51
MXPREG06	38	67	54
MXPREG07	41	73	57
MXPREG08	44	79	60



Om oss

Företaget Milex var först i världen med prolapsringar och har sedan utökat sitt sortiment kraftigt. I Sverige lanserades Milex ringar av företaget Miracon innan agenturen togs över av Solann år 2014. Sedan dess har Milex ringar varit en viktig del i vår produktkatalog och vi gör vårt yttersta för att fortsätta utveckla området. För oss på Solann har det varit viktiga produkter och vi gör vårt yttersta för att utbilda och ta fram det material som efterfrågas till Sveriges sjukvårdspersonal. Med flera års erfarenhet, hög kunskap och snabba leveranser från eget lager i Sverige är vi ett företag du kan lita på.

Utbildning

Efter hundratals möten och tack vare all feedback vi fått från vårdpersonal och patienter har vi förstått hur viktigt det är att varje patient får rätt modell och rätt storlek på sin Milex ring. Därför är det självklart för oss att stötta med produktutbildning när det behövs. Vill ni boka in ett besök för utbildning?

Kontakta oss redan idag.

Kontakta oss

Telefon: 08-583 560 60

E-post: info@solann.se / order@solann.se

Chatt: www.solann.se

Mer från Solann


Vi har ett brett utbud av produkter inom gynekologi. Gå gärna in på www.solann.se för att läsa mer om våra olika produkter:

- Cellprovtagning
- Endometriprovtagning
- Hydrosonografi & hydrosalpingografi
- Kolposkopi
- Engångsinstrument
- Flergångsinstrument
- Preventivmedel
- Vaginaldilatatorer
- Konisering
- Uterus manipulatorer
- Lone Star - självhållande sårhakar


Inch till millimeter

inch	mm
1¾	44
2	51
2¼	57
2½	64
2¾	70
3	76
3¼	83
3½	89
3¾	95
4	102
4¼	108
4½	114
4¾	121
5	127

Millimeter

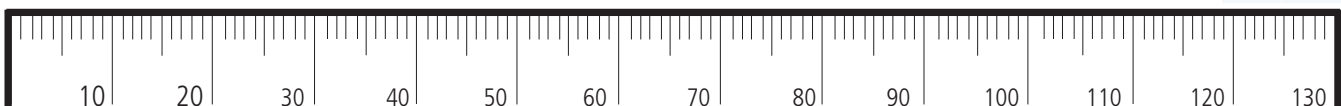

Nöjda patienter går hem[®]

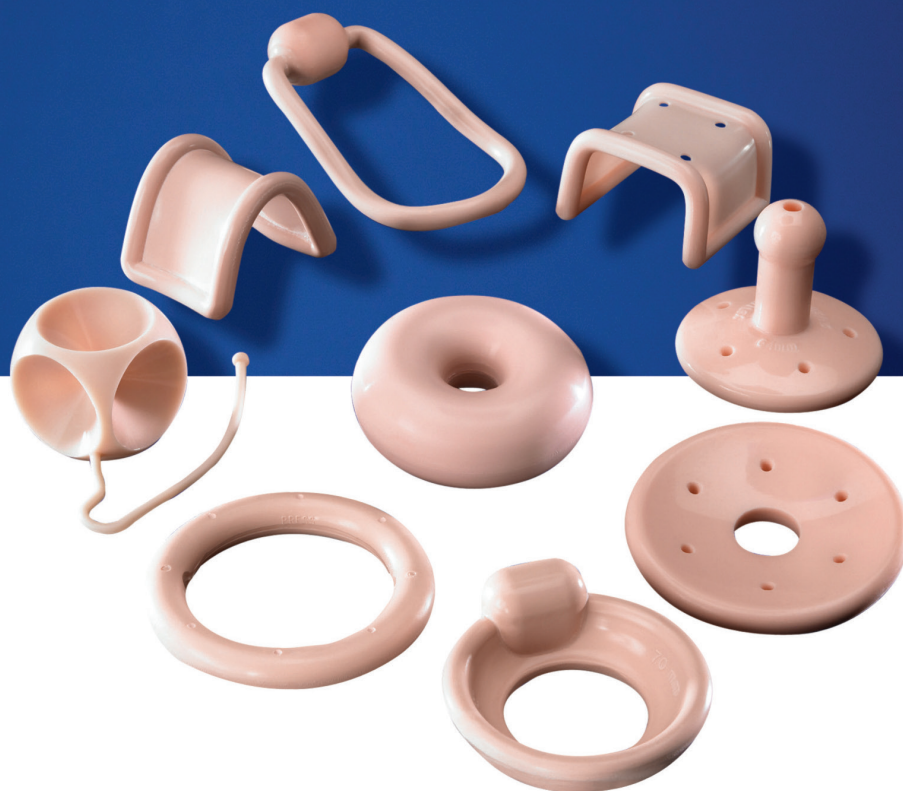

 **solann[®]**

@operSurgical