

Provox® Plug och Provox® Vega™ Plug


Provox Plug är ett första-hjälpen-verktyg för att tillfälligt stoppa läckage genom röstventilen.

Pluggen sätts in i öppningen på Provox röstventil med hjälp av den icke-borstförsedda änden av en Provox Brush. Säkerhetssträngen kan tejpas fast på huden om så önskas. Det går inte att tala medan Provox Plug sitter på plats, men talet återställs när den tagits bort. Patienten avlägsnar Provox Plug genom att dra i säkerhetssträngen.

Fördelar:

- Patienten kan snabbt stoppa läckage genom röstventilen för att sedan uppsöka sjukvård.
- Kan desinficeras med alkohol eller väteperoxid för optimal hygien.

Obs! Provox Vega Plug är avsedd för Provox Vega röstventiler och Provox Plug är avsedd för Provox 2, Provox (1) och Provox ActiValve.

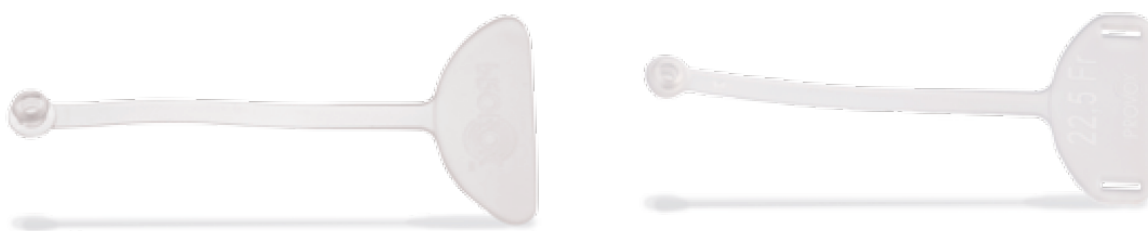

Tillbehör för patient	Antal	Storlek	REF
Provox Plug	1 st		7205
Provox Vega Plug, 17 Fr*	1 st		8119
Provox Vega Plug, 20 Fr*	1 st		8129
Provox Vega Plug, 22.5 Fr	1 st		8139

Osteril, återanvändbar. Avsedd för enpatientsbruk.