



## Cellona gipsbinda

### Överlägset finkrämig högvärdig gipsmassa

Cellona gipsbindor är lindade på specialhylsor, vilka genomfuktas snabbt och jämnt med kort doppningstid. Gipset är genom sin finkrämighet mycket lätt att modellera.

#### Dopptid och torktid:

Dopptiden är 1 sekund/meter binda. Torktiden uppgår till 3 1/2 minuter vid en vatten temperatur på 20°C.

#### Belastning:

Efter 30 min kan man belasta gipset och transportera patienten. Efter 24 timmar kan man belasta gipset fullt ut.

#### Material:

Gasväv av 100% blekt bomull belagd med kalciumsulfathemihydrat (CAS-nummer: 10034-76-1)

#### Förpackningar:

Bindorna är förpackade i plastförpackningar med 5 st/tp.

Cellona finns också som 4-lagriga skenor – Cellona splints.

Storlek	Lev.artnr	Avdfp	Trpfp
<b>Rullar</b>			
5cmx2,7m	91380	12	96
6cmx2m	25 400	60	60
8cmx3m	25 411	40	40
10cmx3m	25 412	40	40
12cmx3m	25 413	40	40
15cmx3m	25 414	40	40
20cmx3m	25 415	30	30
40cmx5m	20301	1	10
60cmx5m	20302	1	10
80cmx5m	20303	1	10
<b>Splints (4-lagers)</b>			
10cmx20m	25 500	1	1
12cmx20m	25 501	1	1
15cmx20m	25 502	1	1
20cmx20m	25 503	1	1

