




PRODUKTFAKTABLAD TENA LADY NORMAL, EXTRA, SUPER

Användningsområde

TENA Lady Normal, Extra och Super är läckagesäkra, bekväma och diskreta skydd för medelstora urinläckage.

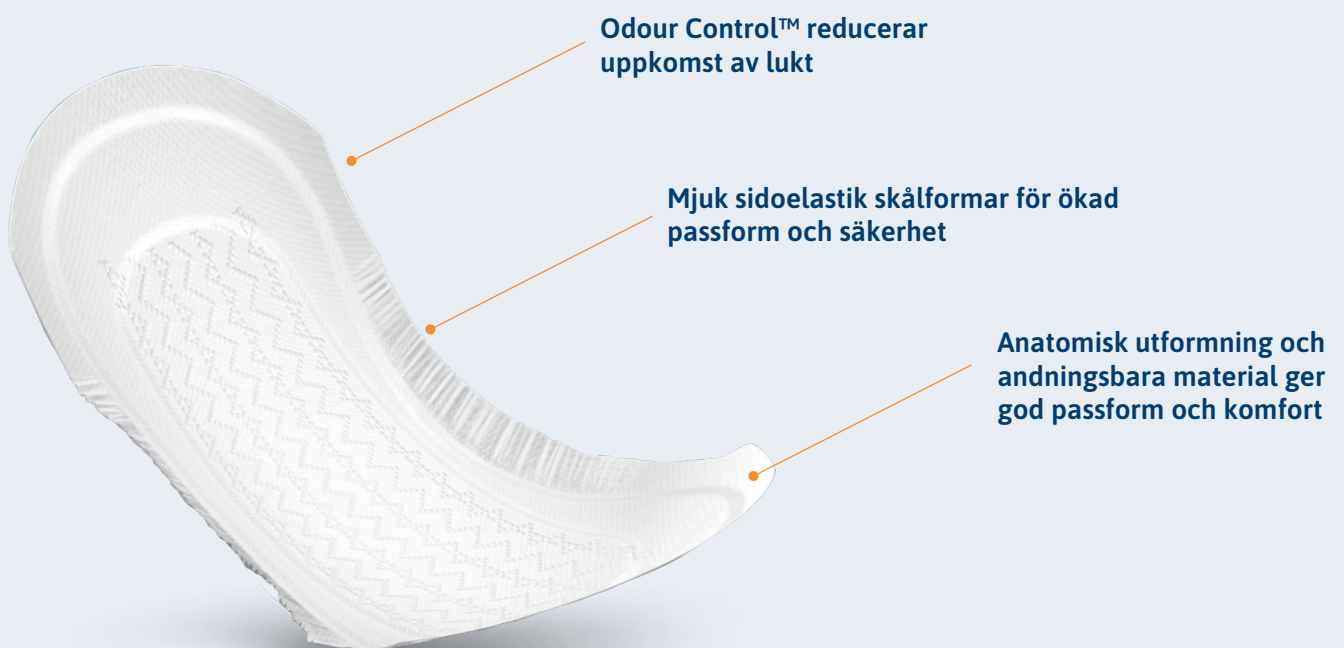

Odour Control™ reducerar uppkomst av lukt

Mjuk sidoelastik skålformar för ökad passform och säkerhet

Anatomisk utformning och andningsbara material ger god passform och komfort



Produktfaktablad TENA Lady Normal, Extra, Super

Produktegenskaper

TENA Lady Normal, Extra och Super har dubbla kärnor som absorberar urinen snabbt, sprider och lagrar den i botten av skyddet. Det gör att ytan känns torr och risken för läckage minskar.

TENA Lady Normal och Extra är försedda med mjuk sidoelastik och TENA Lady Super har en mjuk längsgående trådelastik. Detta skålformar produkterna och bidrar till god komfort och passform, vilket ökar läckagesäkerheten. Ett mjukt yskikt närmast huden (Silky Softness) och andningsbart spärrskikt som är klätt med textilliknande nonwoven ger god komfort och hudhälsa. Odour Control™ hjälper till att förhindra oönskad lukt.


Skyddet fixeras enkelt i åtsittande trosa och sitter säkert på plats, utan att lämna häftrester på textilier, med en bred längsgående tejprensa på produktens baksida. Skyddspappret är märkt med produkt-namn/storlek.



TENA Lady										
Uppsugningsnivå/ storlek	Svanen- märkt	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Antal/ påse st	Antal/ kart st	Antal kart/ halvpall	Praktisk absorption	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Normal	✓	27,5	10,6	15,6	30	360	18	115	346	76 14 80
Extra	✓	34	12,1	25,1	30	240	16	185	554	76 15 80
Super	✓	43	20,1	43	30	180	12	301	904	76 17 15



Snabbt absorberande kärna
för en torr yta

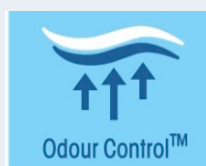

Odour Control™ hjälper till att
förhindra oönskad lukt

Användarinstruktion

Dra bort skyddspappret från baksidan av skyddet.

Fäst skyddet i åtsittande trosa eller fixeringsbyxa. Se till att skyddet behåller sin skålform.

Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning.

Produktfaktablad TENA Lady Normal, Extra, Super

Ingående material

YTSKIKT

Material: Non-woven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester

Funktion: Släppa igenom urin snabbt så att ytan hålls torr

ABSORPTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och lagra urin

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Magasinera urin, fördröja bakterietillväxten vilket minskar risken för att oönskad lukt uppstår

ELASTIK

Material: Polyuretan, polyisopren (Super)

Funktion: Komfort, läckagesäkerhet och skålform

SPÄRRSKIKT

Material: Permeabel polyetenfilm (PE)

Funktion: Hindra genomvätning

För samtliga TENA Lady skydd gäller att följande material/ämnen inte har tillsatts produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 - 27 20 20

🌐 tena.nu

✉ tena.nu@essity.com

📘 facebook.com/TENASverige



TENA,
an Essity brand

