




## Självhäftande väv

Mefix är den ideala fixeringen av förband, kompresser, katetrar och slangar. Det ger säker fixering och vidhäftningen är hudvänlig.

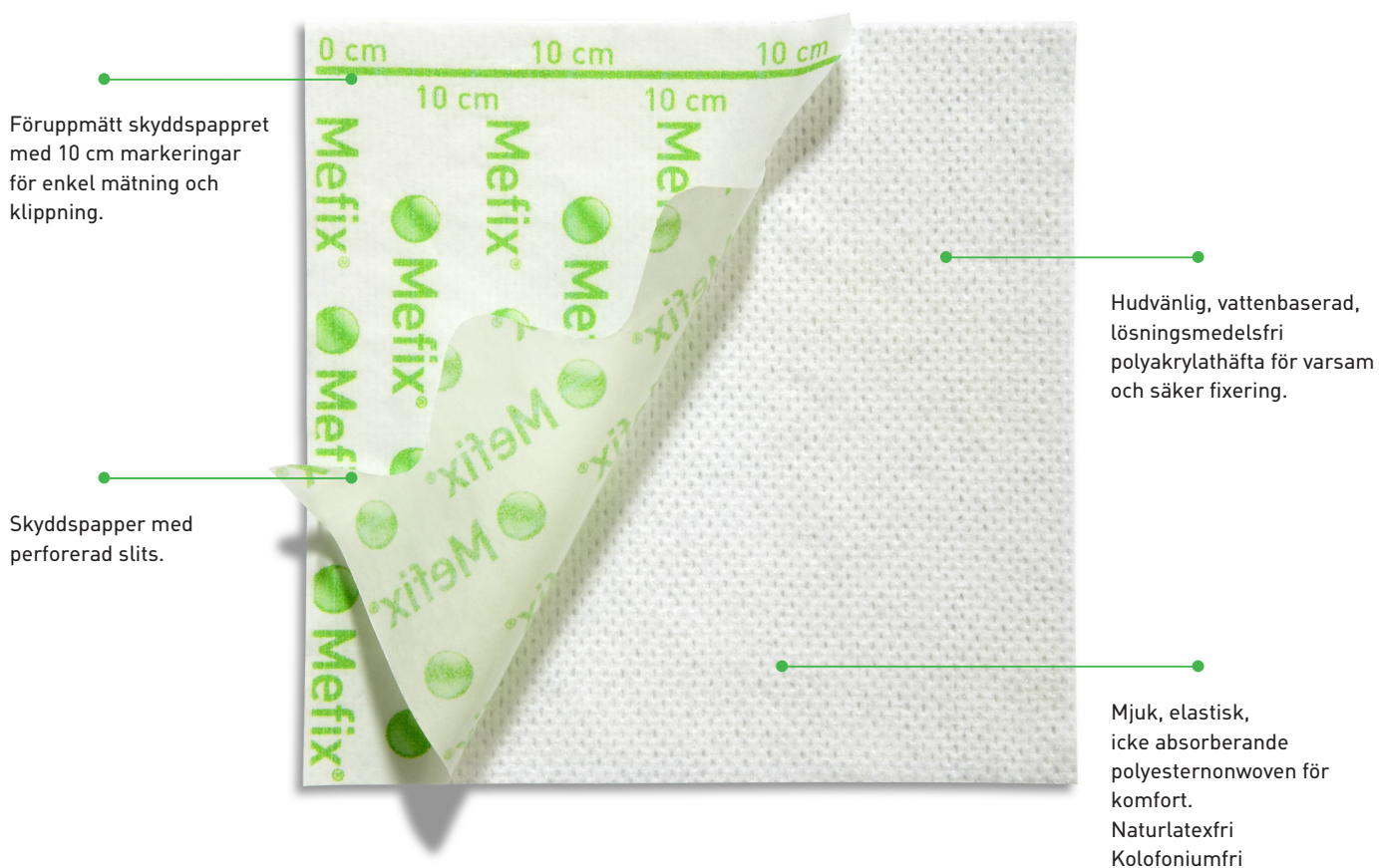

## Så här fungerar Mefix

Nonwovenmaterialets porösa struktur säkerställer att luft och vattenånga släpps igenom. Materialet är elastiskt-följer kroppen och tillåter full rörlighet. Materialet är flexibelt, formar sig efter kroppskonturer och låter kroppen röra sig. Materialet är icke-absorberande och utgör en barriär som skyddar mot läckage av blod och vätskor.


Den vattenbaserade polyakrylathäftan har utformats för att vara hudvänlig och samtidigt ge en säker fixering.

Skyddspappret som är enkelt att ta bort är föruppmaßt i intervaller om 10 cm och har en perforering för enkel borttagning och applicering. Mefix kan enkelt klippas i önskad storlek och form.

## Användningsområden

Mefix kan användas i en mängd olika situationer där säker fixering krävs, t.ex. fixering av förband, kompresser, katetrar och slangar.

## Så här används Mefix – fixering genom att använda S-perforeringen.

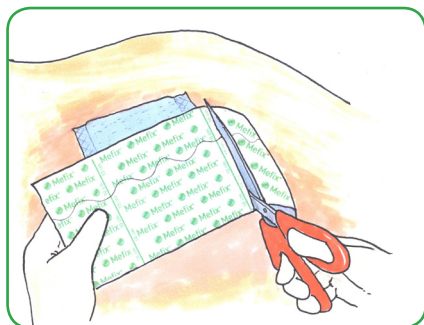

Klipp till önskad storlek.



Separera de två delarna av skyddspappret, genom att försiktigt vika Mefix. Ta bort den smala delen.



Fäst förbandet på huden. Ta bort resterande skyddspapper. Stryk varsamt över Mefix för att förbandet ska fästa ordentligt. Sträck inte Mefix vid applicering.

## Fördelar med Mefix

- Hudvänlig, vattenbaserad och lösningsmedelsfri häfta.
- Föruppmaßt skyddspapper för enkel mätning och klippning.
- Formar sig väl efter kroppskonturer.
- Släpper igenom luft, förhindrar maceration och ger bättre komfort.
- Kan steriliseras med ånga och EtO.

## Observera

Precis som andra självhäftande förband ska inte Mefix sträckas vid applicering, då detta kan skada den friska huden. Detta är extra viktigt vid applicering över leder.



Mefix är osteril och förpackad i dispenserkartonger. Den finns på 2,5- och 10-metersrulle.

Art.nr.	Bredd i cm	Antal per kartong
10 meters rullar		
310250	2,5	39
310500	5	20
311000	10	20
311500	15	20
312000	20	10
313000	30	10
2,5 meters rullar		
310570	5	36
311070	10	18
311570	15	12

Mölnlycke Health Care AB  
Box 13080, 402 52 Göteborg  
Telefon: 031-722 30 00  
www.molnlycke.com

Mölnlycke-symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB.