

## Uterina Explora modell I curette



### Metodanvisning

#### Indikation

- Upptäcka endometriehyperplasia.
- Upptäcka endometrialcancer.
- Initial endometriebiopsi vid östrogenterapi.
- Periodisk kontroll av endometriet under östrogen-terapi.

Flexibilitet med böjd nyloncurette, den smala diametern och den skarpa Randall-Type eggen, resulterar i ett gott material från hela uterus-kaviteten. Även från uterus-kaviteten och från de svåråtkomliga cornua. Den runda änden på curetten minimerar risken för perforation.


*Sedvanliga förberedelser för undersökningen.*

#### Instruktioner

1. Sondera uterus-kaviteten ang. läge, position och djup. Ställ därefter in O-ringen på curetten. Minskar risken för perforation.
2. För in curetten i uterus och drag därefter ut införaren. På curettens kopplingsdel finns ett platt märke, som motsvarar eggen på curettens ände. Detta underlättar din orientering vid rotation av curetten.
3. Koppla på sprutan och vrid medsols tills stopp.
4. Drag ut kolven för att etablera undertrycket. Vrid därefter kolven medsols tills stopp. Härigenom erhålles ett fast sug och curetten kan hanteras med en-hands-grepp. Normalt undertryck mellan 6-8 cc.
5. Arbeta med långa långsamma drag så erhålles fina strimlor.
6. Om utbytet är tillräckligt avslutas provtagninggen, se under punkt 8.
7. Om utbytet inte är tillräckligt, koppla bort sprutan och spruta ned innehållet i fixationskärlet. Koppla därefter på sprutan igen och följ direkt punkt 3.
8. Efter avslutad provtagning, tag bort sprutan från curetten, och drag därefter ut curetten. Innehållet i sprutan sprutas ned i fixationskärlet. För att få med allt provtagningsmaterial, klipp gärna av änden med eggen och låt den medfölja till analys.

**OBS!** Pressa inte ned kolven i sprutan när den är kopplad till curetten.

*Sedvanlig efterkontroll.*

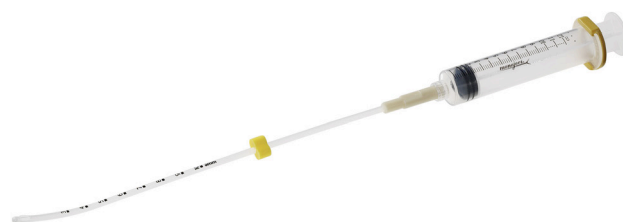

#### Explora modell steril, engångs, 25 st/fp

- En lång nylonkyrett med skärande ände (Randall)
- Stylet
- Vacu-Lock sprut, 15-20 inHg, (6cc - 12 cc)

**MX120** Uterina Explora 3 mm

**MX124** Uterina Explora 4 mm