

# Versatus™ - W

Perifer venkateter med vingar / och injektionsport



## Smidig venpunktion Bättre komfort för patienten

### *Inre kanyl*

Slipningskvaliteten på den inre kanylen garanterar ett säkert instick.

### *Konformad kateterspets*

Den perfekt avsmalnande kateterspetsen gör det möjligt för katetern att tränga in i venen utan att orsaka någon venskada, och gör den lättplacerad. På så sätt garanteras patientens komfort. Kanylens optimala slipning och avståndet till kateterspetsen minskar risken för genomstick.

### *Kateter med vingar*




Vingarna gör det lätt att fixera katetern. Den EN/ISO-färgade kroppen på Versatus™-W med vingar bekräftar kateterstorleken.

### *Injektionsport*

Denna möjliggör intermittenta injektioner av läkemedel under infusionen. Tack vare dess centrala position är det mindre risk för skador på venen och patienten under intermittenta injektioner.


### *Material*

Katetern är tillverkad av polyuretan (PUR) som är styvt i rumstemperatur och mjukare i kroppstemperatur, knickningsresistent och biokompatibelt: patientkomforten förbättras. Denna kateter är röntgentät.

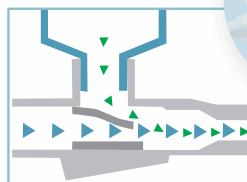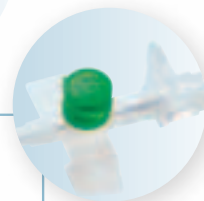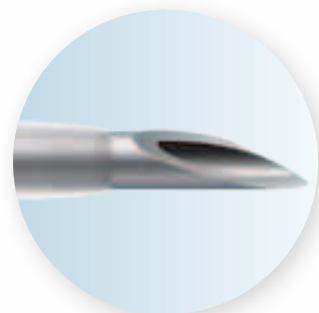

## Obturator

En Luer Lock obturator (mandrin) med samma färgkodning som katetern finns i alla storlekar (utom 26 gauge). Detta förhindrar koagel i kateterlumen vid avslutad infusion.

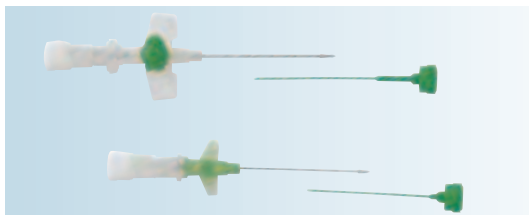

Produktkod Versatus™-WP med vingar / och injektionsport	EN/ISO- färgkodning	Extern kateter- diameter Gauge mm	Intern kateter- diameter mm	Kateter- längd mm	Flödes- hastighet mL/min.	Obturator
SR+DU2619PX	Violett	26	0,64	0,45	19	
SR+DU2419PX	Gul	24	0,74	0,55	19	SO+DM2419P
SR+DU2225PX	Blå	22	0,90	0,65	25	SO+DM2225P
SR+DU2032PX	Rosa	20	1,00	0,75	32	SO+DM2032P
SR+DU1832PX	Grön	18	1,30	0,95	32	SO+DM1832P
SR+DU1845PX	Grön	18	1,30	0,95	45	SO+DM1845P
SR+DU1745PX	Vit	17	1,50	1,15	45	SO+DM1745P
SR+DU1645PX	Grå	16	1,75	1,35	45	SO+DM1645P
SR+DU1445PX	Orange	14	2,00	1,55	45	SO+DM1445P

## Backflöde

Backflödeskammaren transparent för att underlätta snabb upptäckt av backflöde. En ventilationspropp med hydrofob filter tillåter luftpassage och garanterar en tillförlitlig förslutning för att undvika alla risker för kontamination. Luer Lock-proppen gör det möjligt att stänga katetern när den inre kanylen har dragits ut.



Produktkod Versatus™-W med vingar	EN/ISO- färgkodning	Extern kateter- diameter Gauge mm	Intern kateter- diameter mm	Kateter- längd mm	Flödes- hastighet mL/min.	Obturator
SR+DU2619WX	Violett	26	0,64	0,45	19	
SR+DU2419WX	Gul	24	0,74	0,55	19	SO+DM2419W
SR+DU2225WX	Blå	22	0,90	0,65	25	SO+DM2225W
SR+DU2032WX	Rosa	20	1,00	0,75	32	SO+DM2032W
SR+DU1832WX	Grön	18	1,30	0,95	32	SO+DM1832W
SR+DU1845WX	Grön	18	1,30	0,95	45	SO+DM1845W
SR+DU1745WX	Vit	17	1,50	1,15	45	SO+DM1745W
SR+DU1645WX	Grå	16	1,75	1,35	45	SO+DM1645W
SR+DU1445WX	Orange	14	2,00	1,55	45	SO+DM1445W



**Terumo Corporation**  
44-1, 2-chome, Hatagaya  
Shibuya-ku, Tokyo 151-0072,  
Japan  
Tel.: +81 3 3374 8111  
Fax: +81 3 3374 8196

### European Headquarters

**Terumo Europe N.V.**  
Interleuvenlaan 40  
3001 Leuven, Belgium  
Tel.: +32 16 38 12 11  
Fax: +32 16 40 02 49

### European Offices

**Terumo Europe N.V.  
Benelux Sales Division**  
Interleuvenlaan 40  
3001 Leuven, Belgium  
Tel.: +32 16 39 25 80  
Fax: +32 16 39 25 99  
The Netherlands:  
Tel.: 0800 0220396  
Fax: 0800 0220414

**Laboratoires Terumo France S.A.**  
Parc Ariane - Bât. Uranus  
1, rue Hélène Boucher  
78284 Guyancourt Cedex, France  
Tel.: +33 130 96 13 00  
Fax: +33 130 43 60 85

### Terumo Deutschland GmbH

Ludwig-Erhard-Strasse 6  
65760 Eschborn, Germany  
Tel.: +49 6196 80 230  
Fax: +49 6196 80 23 200

### Terumo Deutschland GmbH

Zweigniederlassung Spreitenbach  
Bodenackerstrasse 3  
8957 Spreitenbach, Switzerland  
Tel.: +41 56 419 10 10  
Fax: +41 56 419 10 11

### Terumo Europe España SL

Avda. Juan Carlos I, Nº 13 - 7ª Planta  
Edificio Torre La Garena  
28806 Alcalá de Henares (Madrid),  
Spain  
Tel.: +34 9021 01 298  
Fax: +34 9021 01 358

### Terumo Italia S.r.l.

Via Simone Martini, 143/145  
00142 Roma RM,  
Italy  
Tel.: +39 0651 96 14 20  
Fax: +39 0650 30 407

### Terumo Sweden AB

Nya Varvet, Byggnad 90  
Sven Källfelts Gata 18  
426 71 Västra Frölunda,  
Sweden  
Tel.: +46 3174 85 880  
Fax: +46 3174 85 890

### Terumo Denmark

**Filial of Terumo Sweden AB**  
Tel.: +45 7020 93 80  
Fax: +45 7020 94 80

### Terumo UK Ltd

Tamesis  
The Causeway  
Egham, Surrey  
TW20 9AW, United Kingdom  
Tel.: +44 1784 476 200  
Fax: +44 1784 476 201

### Terumo Europe N.V.

**Moscow Representative Office**  
JSC Northern Tower  
13Fr., 10 Testovskaya Street  
Moscow 123317, Russia  
Tel.: +7 495 988 4740  
Fax: +7 495 988 4739

Addresses subject to change,  
please consult our Website.

© Registered Trademark  
Published by Terumo Europe N.V.  
HO 1015W-0211-I(02.11)E