

## Återupplivningsmasker för barn



### ENGÅNGSÅTERUPPLIVNINGSMASKER FÖR BARN

Fisher & Paykel Healthcare's återupplivningsmasker för barn är utvecklade för att passa barns ansikten och underlättar återupplivning.

Hela sortimentet av masker är konstruerat för användning tillsammans med Neopuff™ spädbarnsrevivator med t-stycke och kan ansluta till andra återupplivningsanordningar.

Fisher & Paykel Healthcares återupplivningsmasker för barn erbjuds i ett antal olika storlekar och ger en anatomisk tätning.

## Tillgängliga Storlekar

Återupplivningsmaskerna för spädbarn finns i fem storlekar. Sortimentet innehåller extra små storlekar för mikro-prematura nyfödda och upp till större storlekar för spädbarn och barn. Detta säkerställer att alternativ finns för fler patienter. Grundsatsen innehåller ett maskstorleksdiagram som kan vara till hjälp vid val av mask till patienten.



## Anatomisk Tätning

Den utvidgade kanten på masken är mjuk och smidig och skapar lätt en behaglig anatomisk tätning runt spädbarnets mun och näsa. För att uppnå en bra tätning rekommenderas att försiktigt rulla på masken på ansiktet från hakan och att använda C-handgreppet.



### 1. Anatomisk tätning

- Mjuk och böjbar förlängd kant
- Stabila kanter som ger stöd



### 2. Synlighet

- Genomsiktig yta
- Gör att andningskondensat syns tydligt



### 3. Mångsidig anslutning

- ISO 5356-1:2004 15 mm konisk hane
- Kan anslutas till vanliga återupplivningsapparater



### 4. Storleksurval

- Extra små maskstorlekar för prematura barn
- 35 mm avbildad till vänster i normal storlek

## ÅTERUPPLIVNINGSMASKER FÖR BARN

	RD803-10 Mikro-prematur (XS)	RD804-10 Prematur (S)	RD805-10 Neonatal (M)	RD806-10 Spädbarn (L)	RD807-10 Barn (XL)
<b>Diameter</b>	35 mm (1,38")	42 mm (1,65")	50 mm (1,97")	60 mm (2,36")	72 mm (2,83")
<b>Rekommenderade viktintervall</b>	400 g - 1 kg (0,88-2,2 lb)	<1,5 kg (<3,3 lb)	<2,5 kg (<5,5 lb)	< 5 kg (<11 lb)	<10 kg (<22 lb)
	Extremt låg födelsevikt (ELBW)	Mycket låg födelsevikt (VLBW)	Låg födelsevikt (LBW)	Spädbarn	Barn
<b>Material</b>	Termoplastiskt elastomer (produkten innehåller inte latex eller DEHP-mjukgörare)				
<b>Rengöring och kassering</b>	Enpatientsbruk - levereras ren, inte steril. Kassera enligt sjukhusets föreskrifter.				

Det finns en rad satstillval till återupplivningsmasker för spädbarn, inklusive en maskstartsats (RD900-EN). Dessa tillval finns i Neopuffs produktkatalog.