


Mepitel® Film

HUDVÄNLIGT FILMFÖRBAND

- Mepitel Film är ett mjukt, transparent och andningsbart filmförband som skyddar huden. Det kan användas separat eller tillsammans med andra produkter.
- Mepitel Film minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte. ^{1,2,3,4,5,6}
- Mepitel Film är formbart och enkelt att applicera.

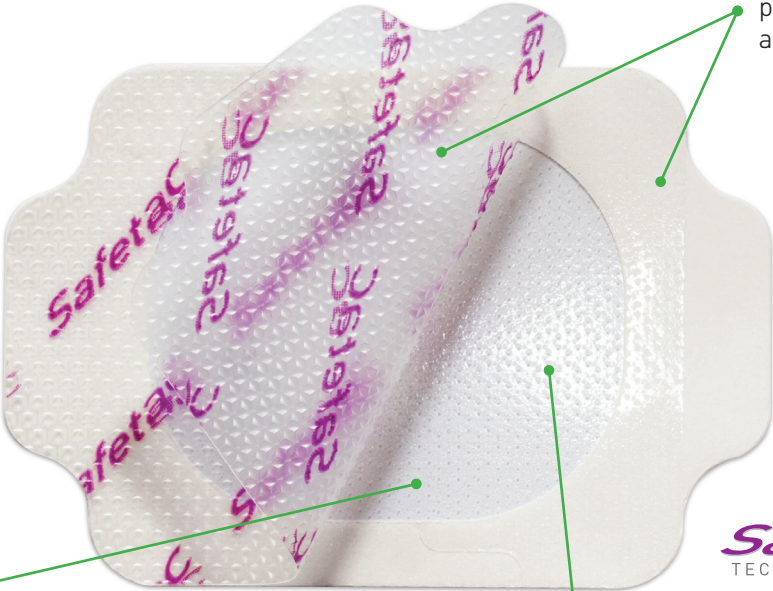

Skyddspapper och pappersram för enkel applicering

Safetac® yta

- Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte ^{1,2,3,5,6}
- Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden ²
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration ^{3,4}

- Transparent, andningsbar, elastisk polyuretanfilm för komfort och optimal sårhelingsmiljö
- Duschbart
- Virus- och bakteriebarriär*

Safetac
TECHNOLOGY


Safetac® teknologi

*mikrober större än 25nm


Safetac® teknologi. Mindre smärta. Mindre vävnadsskada.

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte. Safetac finns exklusivt på förband från Mölnlycke Health Care.

För mer information besök www.safetac.se

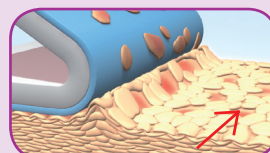

Hudceller dras av med traditionell vidhäftning.

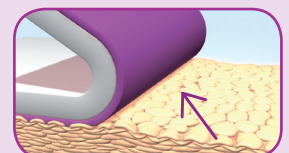

Inga hudceller dras av med Safetac.

Så här används Mepitel® Film



Torka huden/hudområdet grundligt.
Avlägsna skyddspappret (med Safetac-tryck).



Applicera förbandet. Mepitel Film kan
ompositioneras så länge pappersramen är
intakt. Avlägsna den vita pappersramen.
Sträck inte förbandet vid applicering.
För bäst resultat ska Mepitel Film överlappa
den omkringliggande torra huden med minst
1-2 cm för storlekar upp till 10x12 och 5 cm för
större storlekar.



Stryk ut förbandet på huden. Mepitel Film
kan avlägsnas utan att orsaka hudstrippning
och smärta.

Så här fungerar Mepitel® Film

Mepitel Film ger ett flexibelt och transparent skydd för huden/
såret och förhindrar mikrobiell kontaminering. Förbandet fungerar
även som en barriär mot vätska och formar sig väl efter kroppens
konturer. Mepitel Film bibehåller en fuktig sårmiljö och den höga
andningsbarheten tillåter överflödigt fukt att avdunsta. Safetac-ytan
gör att Mepitel Film vidhäftar omedelbart vilket minskar behovet
av extra tryck för fixering. Vidhäftningen med Safetac ger ingen
vävnadsskada vid förbandsbyte. Förbandet lämnar inga rester vid
avlägsnandet.

Fördelar med Mepitel® Film

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Minskar risken för skada på nybildad vävnad
- Transparensen gör det enkelt att inspektera såret
- Formar sig väl efter kroppens konturer
- Virus- och bakteriebarriär*
- Liten risk för hudirritation och allergi
- Lämnar inga rester
- Skyddar mot extern kontamination
- Duschbar

Bytesfrekvens

Mepitel Film kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets och den
omkringliggande hudens tillstånd eller enligt gällande klinisk praxis.

Varning

Mepitel Film kan inte användas till primär fixering av IV, kanyler,
ingångar eller andra infusioner samt livsuppehållande utrustning.

*mikrober större än 25nm

Observera

- Mepitel Film är inte ett sårkontaktlager och tillåter inte
sårsekret att passera till ett ytterförband.
- Om mer än en produkt används och de överlappar varandra
minskar andningsbarheten. Det kan leda till att överflödigt fukt
inte kan avdunsta från huden.

Användningsområden

Mepitel Film är utvecklat för flera olika typer av sår, så som:

- Behandling av yttliga
 - hudskador
 - trycksår kategori 1 och 2
 - brännskador
- Skydd av känslig och skör hud
- Skydd av öppna kirurgiska sår
- Fixering av primärförband
- Landing Zone för fixering av tejp
- Kan kombineras med geler och salvor



MEPITEL FILM (levereras steril)

Art nr	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
296170	6 × 7	10	50
296270	10 × 12	10	70
296470	10 × 25	10	50
296670	15 × 20	10	70