

Produktblad Näringspreparat med tillbehör

SpecialNeeds-napp med flaska, för barn med LKG

För spädbarn med amningssvårigheter, i synnerhet barn med läpp- och/eller gomspalt, barn med Downs syndrom eller vid neurologiska sjukdomar. Känslig för den allra minsta sugansträngning. Envägsventil förhindrar att mjölken rinner för fort eller backar i flaskan.



Hopsättning av ventil och flaska

1. Pressa fast membranet på ventilplattans ovansida så att proppen går helt igenom hålet i plattan.
2. Häll önskad mängd mat i flaskan.
3. Lägg den monterade ventilen över flaskans hals (se till att membranet och den höga kanten är vända uppåt).
4. Placera nappen på ventilplattan och skruva sedan ihop delarna med det gula locket

Fyllning av nappen

1. Håll flaskan upprätt och tryck ut lite luft ur nappen.
2. Håll kvar trycket och vänd flaskan upp och ned.
3. Släpp efter på trycket och mjölk kommer ut i nappen.
4. Upprepa tills nappen är helt fylld.

Kontroll av flödet

Mundelen av nappen har en öppning i form av en skåra som kan justeras för att passa Er baby. Flödena visas av de tre linjerna på nappen, den längsta för maximalt flöde, den något kortare för mediumflöde och den kortaste för minimalt flöde. Starta med skåran i horisontellt läge för minimalt flöde om Er baby behöver vänja sig vid nappen innan matningen börjar. Skåran stängs mellan barnets sugningar så barnet aldrig får för mycket mjölk. För att justera flödet, vrid nappen så att den önskade linjen (minimalt, medium eller maximum) pekar mot Er babys näsa. Om det är nödvändigt kan Ni hjälpa Er baby äta. Tryck försiktigt ihop och släpp nappen för att ge barnet en liten mängd mjölk. Vänta alltid tills barnet svält innan Ni trycker igen.

008.0114	SpecialNeeds-napp med flaska 150 ml	Silikon, PP	CE-märkt
800.0453	SpecialNeeds-napp, 3-pack samt ventilmembran	Silikon	CE-märkt