

Graderad kompression med kontroll

Effektiv, kvarhållen kompression

Enkel applicering

Kostnadseffektiv behandling

 **smith nephew**  
**Profore** 

Kompressionsbehandling



# Profore <sup>◇</sup> - Kompressionsbehandling

PROFORE\* innehåller en icke vidhäftande kompress och bandageanpassande till olika ankelomfång, för flerlayerskompression vid venös insufficiens. PROFORE i praktiken: Mät patientens ankelomfång och välj en passande storlek. Mät även ankelindex innan behandlingen startas. Ankel/ armtrycksindex, får inte ligga under 0,8, eftersom kompressionsbehandling med PROFORE då är kontraindicerat. Rengör såret och benet på sedvanligt vis innan sårkontaktlagret av viskos appliceras. Börja därefter linda enligt följande instruktion. OPSITE Spray är en transparent och snabbtorkande film som är enkel och bekväm att använda. Filmen bildar ett skydd över torra kirurgiska och ytliga sår. OPSITE Spray är genomsläpplig för vattenånga och luft.

**PROFORE #1:** polstervadden av viskos appliceras från tåbasen till knävecket, i cirkelturer med 50% överlappning utan sträckning. Se till att detta lager blir så slätt som möjligt. Använd ev överbliven polstervadd för att ytterligare skydda utstående benområden och för att fylla ut eventuella håligheter bakom malleolen.

**PROFORE #2:** är en kräpplinda av bomull som appliceras från tåbas till knäveck. Även denna binda appliceras med 50% överlappning och cirkelturer utan sträckning. Lämna en liten kant av polstervadden synlig.

**PROFORE #3:** är ett lätt elastiskt lager som består av rayon, nylon och elastiska trådar. Linda benet från tåbasen (inled med två turer vid tåbasen) upp till knävecket med åttatalsturer. Följ den gula mittmarkeringen för att uppnå 50 % överlappning och 50 % sträckning. Lämna en synlig kant av polstervadden. Lager #3 har nu byggt upp ett tryck på ca17mmHg vid ankeln, avtagande uppåt.

**PROFORE #4:** består av ett elastiskt kohesivt lager (CO-PLUS). Börja linda vid tåbasen (två turer), linda över hälen och se till att foten täcks ordentligt. Fortsätt upp över benet i cirkelturer med 50% sträckning och 50% överlappning. Se till att de sista 15 cm av bindan inte sträcks. Klipp av ev överbliven binda och fixera genom lätt tryck. Kompressionstrycket vid ankel är nu 40 mmHg avtagande uppåt. Bytes vanligen en gång i veckan men initialt kan tätare byten krävas beroende på ödemstatus och sårsekretion.



PROFORE #1



PROFORE #2



PROFORE #3



PROFORE #4:

Art.nr	Produkt		Fp/set
	Ankelomfång	Innehåller/lager	
66000015	< 18 cm	#1,#1,#2,#3,#4	4
66000016	18-25 cm	#1,#2,#3,#4	8
66000017	25-30 cm	#1, #+,#4	8
66000018	>30 cm	#1,#2, #+,#4	8
<b>latexfri</b>			
66000770	18-25 cm	#1,#2,#3,#4	8



Wound management

Smith&nephew AB Box 143, 431 22 Mölndal Sverige

Tel: 031-7465800 Fax: 031-870531

[www.smith-nephew.com](http://www.smith-nephew.com)

[www.smith-nephew.se](http://www.smith-nephew.se)