

Mestopore[®] S

Absorberande förband för kontinent stomi med mjuk silikon.

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Skonsam mot huden
- Enkel att använda

Absorptionsdyna


- Superabsorberande polyakrylat för extra säkerhet
- Inget fibersläpp
- Lågvidhäftande

Nonwovenfilm

- Vätsketät
- Ångpermeabel

Safetac[®]-yta (mjuk silikon)

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte

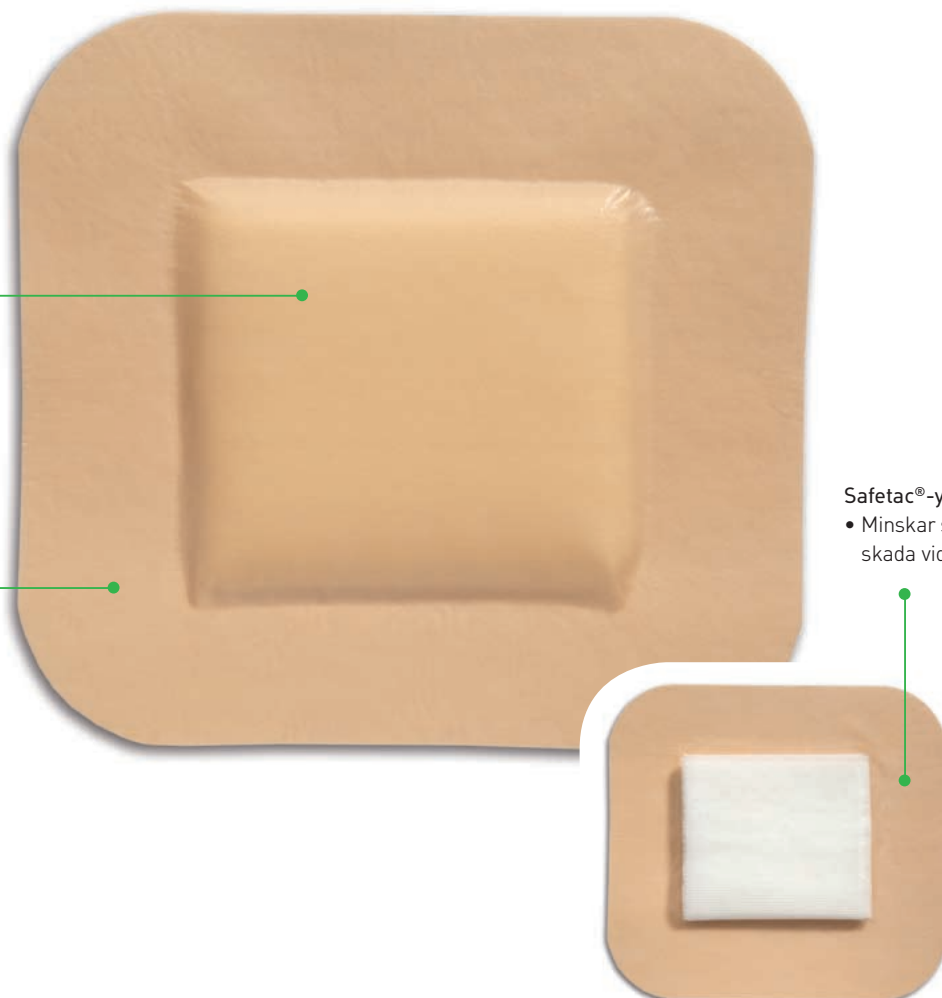


Så här fungerar Mestopore S

Mestopore S är ett självhäftande förband för kontinent stomi. En icke-vidhäftande kontaktyta skyddar stomivävnaden från skada. Sekret från stomin absorberas av högabsorberande fibrer. Den självhäftande kanten förhindrar läckage och är mycket skonsam mot huden, även vid upprepade förbandsbyten.


Användningsområden

Mestopore S är speciellt utvecklad för att användas på: Kontinent stomi.


Så här används Mestopore S

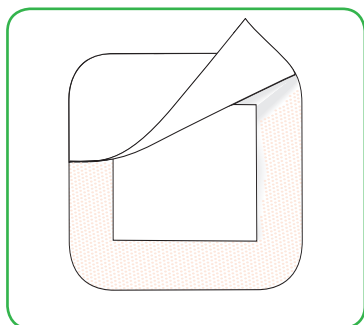

Ta bort skyddspappret från övre halvan av Mestopore S.

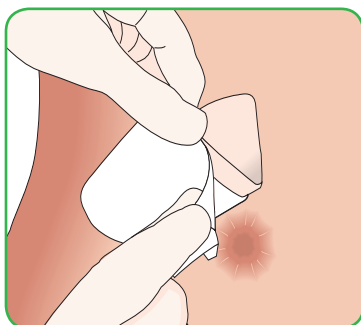

Applicera förbandet försiktigt mot huden över stomin. Ta bort det nedre skyddspappret och sätt fast resten av förbandet.

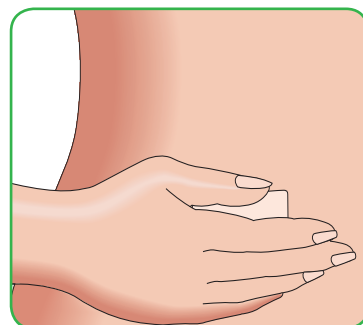

För att ta bort förbandet – lyft försiktigt från sida till sida (inte uppifrån och ner).

Fördelar med Mestopore S

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Hudvänlig häfta
- Skonsam
- Följsam
- Duschbar
- Lämnar inga rester
- Enkel att använda

Safetac® teknologi

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi med mjuk silikon som endast finns på förband från Mölnlycke Health Care.

Fördelar med Safetac:

- Omsluter sårkanterna och förhindrar läckage.
- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte.
- Fastnar inte i fuktig såryta men fäster varsamt på omkringliggande hud.¹⁻³

Referenser:

- 1 Gotschall CS, et al. Prospektive, Randomised study on the Efficacy of Mepitel® on Children with Partial Thickness Scalds. Journal of Burns Care & Rehabilitation. 1998;19:279-83.
- 2 Dahlström K K. Scand J Plast Reconstr Hand Surg 1995;29:325-27.
- 3 Dykes P. The link between the peel force of adhesive dressings and subjective discomfort in volunteer subject. Journal of Wound Care, 2003;12, no 7.

Observera

Vid kliniska tecken på infektion rådgör med vårdpersonal för lämplig infektionsbehandling.



Mestopore S levereras osterila

Art nr	Apotekets varunr	Storlek	Storlek sårdyna	Antal i förpackning
665100	201167	9 × 10 cm	5 × 5,5 cm	160
665100	201427	9 × 10 cm	5 × 5,5 cm	20

Mölnlycke Health Care AB
Box 130 80, 402 52 Göteborg
Tel: 031-722 30 00, Fax: 031-722 34 01
www.molnlycke.com



MÖLNLYCKE
HEALTH CARE

Mölnlycke-symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB.