



Exponeringskontroll  
3M Comply™ autoklavtejp

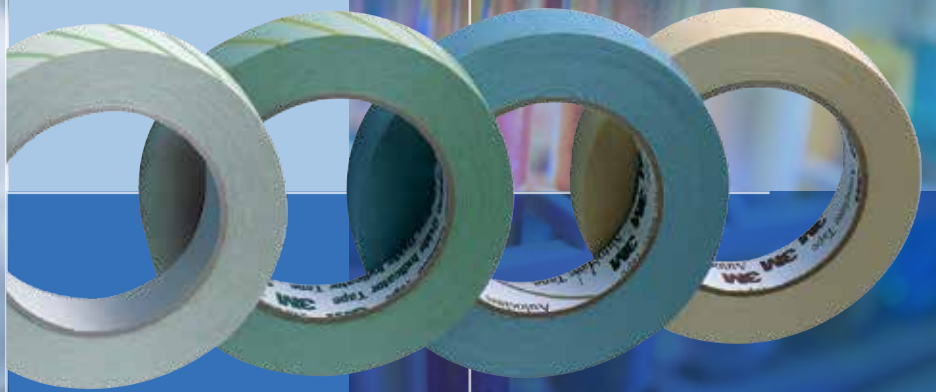

Kvalitetssäkring av  
steriliseringsprocessen

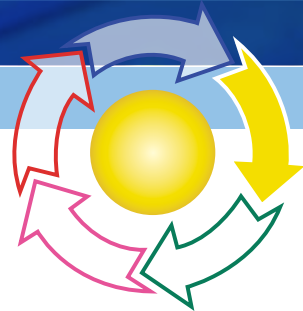

**3M**

## Exponeringskontroll

Exponeringskontroll ger en möjlighet att skilja steriliserat från osteriliserat gods vid första anblicken. Exponeringskontroll är det steg i 3M kvalitetssäkringsprogram för steriliseringsprocessen som säkerställer att varje förpackning eller produkt har exponerats för steriliseringsprocessen, utan att förpackningen öppnas och utan kontroll i register. Med hjälp av kemisk indikatortejp som fästs på utsidan av förpackningen ger färgomslaget en omedelbar visuell indikation på att godset genomgått en steriliseringsprocess. För god kvalitetssäkring märks varje produkt eller förpackning. Sedan mer än 50 år har 3M indikatortejp, numera under varumärket 3M™ Comply™ indikatortejp, använts för att kontrollera och försegla. 3M Comply indikatortejp finns med olika typer av bläck och häftämnen designade specifikt för olika ändamål. Indikatortejp är ett enkelt sätt att indikera sterilstatus för operatör och användare. Med hjälp av exponeringskontroll kan du minimera tiden under vilken autoklaven inte utnyttjas, minska antalet återkallanden och hantera din inventering effektivare.

## Omedelbar identifiering av processat gods


3M erbjuder ett brett sortiment av produkter för exponeringskontroll;

- 3M™ Comply™ indikatortejp för ångsterilisering, EO-sterilisering samt för hetluftsterilisering. Dessa tejper har kemiskt indikatorbläck tryckt i diagonalt mönster som ändrar färg vid exponering för steriliseringsprocessen. Finns specifikt framtagen för ång-, EO samt hetluftssterilisering samt i flera olika bredder och olika typer av häftämnen, även för svåra material.
- 3M™ Comply™ indikatoretiketter med tryckkänsligt häftämne för ångsterilisering.

## 3Ms Kvalitetssäkringsprogram för steriliseringsprocessen

3Ms kvalitetssäkringsprogram för steriliseringsprocessen är en helhetslösning för kontroll av procedurer och metoder för att minimera risken för upptäckta fel i processen och otillräcklig sterilisering.

Programmet omfattar fem separata steg som tillsammans ger kontroll av hela steriliseringsprocessen och hjälper dig att etablera och bibehålla ett konsekvent protokoll för din verksamhet.

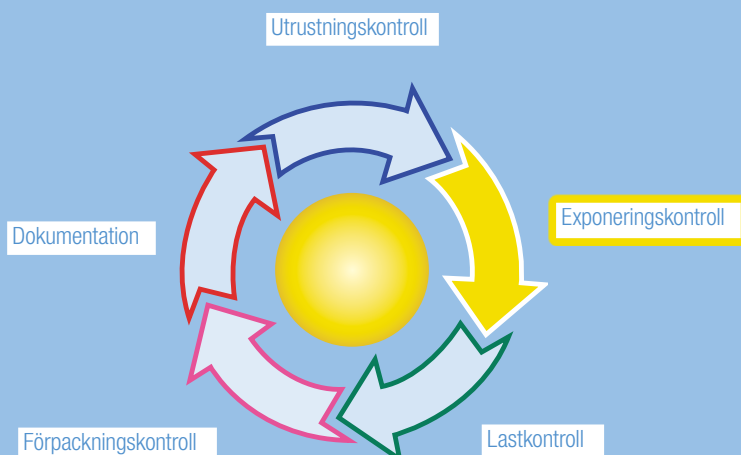

# Att välja indikatortejp för exponeringskontroll

3M™ Comply™ blyfri indikatortejp för steriliseringsprocessen



För ångsterilisering

För hetluftssterilisering

3M Comply indikatortejp 1322 (blyfri, standard) och 1221 (ekonomi) för ångsterilisering är standardtejp, stark nog för de flesta typer av omslag. För svårare material finns 1355 blyfri indikatortejp för ångsterilisering med extra starkt häftämne. Tejpens diagonala ränder skiftar färg efter exponering för steriliseringsprocessen. Operatören kan skriva direkt på tejpens eller använda 3Ms förtryckta etiketter. Alla tejp typer är tøjbara för att minska risken att falla av och möter specifika och generella krav för ångsterilisering. 1224 (EO-sterilisering) och 1226 (hetluftssterilisering) kompletterar vårt sortiment av indikatortejp.

Blyfri indikatortejp för ångsterilisering 1322



Blyfri indikatortejp för ångsterilisering, extra stark 1355



Indikatortejp för EO-sterilisering 1224



Indikatortejp för hetluftssterilisering 1226



3M™ Comply™ indikatoretiketter



3M Comply indikatoretiketter är enkla att använda för snabb identifiering av exponering för steriliseringsprocessen. Den tryckkänsliga etiketten är lätt att få bort efter sterilisering. Etiketten finns för ångsterilisering samt för hetluftssterilisering. Dessa etiketter är särskilt lämpliga att använda på hårda ytor så som glas eller metall.

Oexponerad      Exponerad



3M™ Comply™ blyfria indikatoretiketter på rulle



1322CH är en blyfri etikett med en bas av blå film och en liten bit av 1322 indikatortejp på. Etiketten är framtagen för märkning av metall- eller glasytor så som containrar och lämnar inga häftämnesrester. Etiketten slår om från vit till mörkbrun/svart vid exponering för steriliseringsprocessen. Den avrivbara kanten gör att etiketten avlägsnas lätt och utan kladd. Avsedd för ångsterilisering i enlighet med SS-EN 867-1 och 2.



Best nr	Produkt	Storlek	Antal/förp	Förp/ lev förp
00160	3M™ Comply™ Indikatoretiketter för ångsterilisering	19mm x 32mm	1000	12
00170	3M™ Comply™ Indikatoretiketter för hetluftssterilisering	19mm x 32mm	1000	12
M51	Autoklavtejpållare		1	1
1322-12MM	3M™ Comply™ Indikatortejp för ångsterilisering (blyfri)	12mm x 55m	42	1
1322-24MM	3M™ Comply™ Indikatortejp för ångsterilisering (blyfri)	24mm x 55m	20	1
1322-48MM	3M™ Comply™ Indikatortejp för ångsterilisering (blyfri)	48mm x 55m	10	1
1322-18MM	3M™ Comply™ Indikatortejp för ångsterilisering (blyfri)	18mm x 55m	28	1
1222-7	3M™ Comply™ Indikatortejp för ångsterilisering	38mm x 55m	12	1
1322CH	3M™ Comply™ Indikatoretikett på rulle för ångsterilisering (blyfri)	100mm x 25mm	500	1
1224-0	3M™ Comply™ Indikatortejp för EO-sterilisering	13mm x 55m	36	1
1224-1	3M™ Comply™ Indikatortejp för EO-sterilisering	25mm x 55m	18	1
1224-6	3M™ Comply™ Indikatortejp för EO-sterilisering	19mm x 55m	24	1
1226	3M™ Comply™ Indikatortejp för hetluftssterilisering	19mm x 50m	48	1
1355-24MM	3M™ Comply™ Indikatortejp extra stark för ångsterilisering (blyfri)	24mm x 55m	20	1
1355-18MM	3M™ Comply™ Indikatortejp extra stark för ångsterilisering (blyfri)	18mm x 55m	28	1



**Hälsovård**  
**3M Svenska AB**  
 191 89 SOLLENTUNA  
 Tel: 08-92 21 00 vxl  
 Fax: 08-92 22 89  
[www.3M.com/se](http://www.3M.com/se)