

Artikelnummer:

Fp	Art.nr	Benämning
1	5561.303	CPAP 3, komplett kit – Barn
1	5561.403	CPAP 3, komplett kit – Small
1	5561.503	CPAP 3, komplett kit – Medium
1	5561.603	CPAP 3, komplett kit – Large
1	5571.303	CPAP 3 komplett kit m nebulisator – Barn
1	5571.403	CPAP 3 komplett kit m nebulisator – Small
1	5571.503	CPAP 3 komplett kit m nebulisator – Medium
1	5571.603	CPAP 3 komplett kit m nebulisator – Large
1	527.01	Manometer
20	555.01	Adapter till Endotrachealtub/trachealkanyl
5	5557.35	Mask – Barn
5	5557.45	Mask – Small
5	5557.55	Mask – Medium
5	5557.65	Mask – Large
5	5557.350	Mask – Barn, Luktfri
5	5557.450	Mask – Small, Luktfri
5	5557.550	Mask – Medium, Luktfri
5	5557.650	Mask – Large, Luktfri
10	5558.053	CPAP 3, Extraslang till manometer
10	5558.62	CPAP 3, Extraslang för syrgas/luft
5	5559.01	Fixeringsband (silikon)
5	76320202	Fixeringshuva, tyg elastisk
1	5563.54	Flödesmätare – Luft standard 4,5 bar
1	5563.34SP	Flödesmätare – Luft m 0,5 slang och hållare
1	5563.64	Flödesmätare – Syrgas standard 4,5 bar
1	5563.44SP	Flödesmätare – Syrgas m 0,5 slang och hållare
5	5566.02	FiO ₂ regulator
5	5570.13	CPAP 3 – kit utan mask

Användarinstruktion CPAP Boussignac Enkel, Säker och Effektiv



CPAP Boussignac är en högflödes – CPAP. Följ alltid de föreskrifter som finns vad gäller indikationer/kontraindikationer samt övervakning.

Detta är endast en vägledning som naturligtvis är underordnad de lokala föreskrifter som finns samt läkares ordination.

Enkel bruksanvisning

1. Placera den vita filterdelen av CPAP – generatoren i maskens öppning.
2. CPAP – generators gröna slang kopplas till gaskällan (syrgas alternativt luft).
3. Fäst manometerslangen i manometern och koppla till den lediga porten i CPAP – generatoren.
4. Håll CPAP – masken mot en slät yta (t.ex. en bordsskiva). OBS! Håll EJ handen över CPAP – generators öppning.
5. Öppna flödesmätaren och vrid upp till manometern visar önskat motstånd (PEEP). Följ läkares ordination alt. det motstånd ni brukar använda – PEEP 5 eller 7,5 cm H₂O. Det går utmärkt att ställa in både högre och lägre motstånd.
6. Koppla bort manometern.
7. Placera masken över patientens ansikte så att den sluter tätt och sitter bekvämt.
8. Använd fixeringsband vid behov.

CPAP Boussignac och nebulisering

1. Fyll behållaren med ordinerat läkemedel.
2. Placera nebulisatorn mellan mask och CPAP – generatoren.
3. Koppla CPAP – slangen till flödesmätaren för syrgas alt luft.
4. Ställ in ordinerat motstånd. Koppla bort manometerslangen.
5. Koppla slang mellan nebulisator och flödesmätare för andningsluft alt syrgas och vrid upp flödet till 6 l/min.



FiO₂ regulator

Tillsammans med FiO₂ regulatoren (art.nr 5566.02) skall CPAP Boussignac alltid drivas på syrgas. Med FiO₂ Regulatoren kan syrgaskoncentrationen enkelt ställas in till 30%, 50% eller 100%.



1. Placera FiO₂ regulatoren mellan mask och CPAP generatoren.
2. Koppla CPAP slangen till flödesmätare för syrgas.
3. Stäng manometerporten på CPAP generatoren.
4. Koppla manometerslangen till porten på FiO₂ regulatoren.
5. Vrid ringen på FiO₂ regulatoren till önskad syrgaskoncentration.
6. Ställ därefter in önskat PEEP (ju lägre syrgaskoncentration desto högre flöde för att ställa in PEEP).
7. Om syrgaskoncentrationen ändras under behandling måste PEEP ställas in på nytt.

CPAP kombinerat med inhalation

CPAP behandling med CPAP Boussignac och samtidig inhalation via nebulisator är möjlig (se instruktioner på föregående sida). Finns att beställa i färdiga set (se Sista sidan).

Befuktning

Behovet av befuktning bör anpassas individuellt. CPAP Boussignac är ett öppet system vilket bl.a innebär att patienten självbefuktas sig genom andningen. Vid längre tids kontinuerlig användning rekommenderas befuktning.