

Se upp till våra nya modeller



Laerdal Silikon Andningsballonger



Laerdal
helping save lives

Laerdal Silikon Andningsballonger



Laerdal återanvändbara handventilatorer av silikon har stått för kvalitet, effektivitet och värde under 35 år. Den nya utformningen i silikon och transparent polysulfon gör dem ännu bekvämare att använda, säkerställer lång hållbarhet och tillgodoser behoven från såväl användare som patient.

Säkerhet

- Utformad för enkel montering.
- 15/22 mm standardkopplingar.
- Utformad för att förhindra återinandning av utandad luft.
- Integrerad insugnings-/reservoarventil* ger fullgod användning av omgivningsluft vid syrebrist.
- Funktionstest underlättar upptäckt av felaktig montering.
- 35 cm H₂O-övertrycksventil minskar risken för alltför högt ventilationstryck.
- Patientventil gör att patienter som andas spontant kan inandas syre med minimalt motstånd.
- Alla komponenter, delar och tillbehör är latexfria.
- Transparenta delar av silikon och polysulfon underlättar upptäckt av synliga föroreningar.

Effektivitet

- Silikonballong, integrerad insugnings-/reservoarventil och patientventil tillåter effektiv tillförsel av tidalvolym och snabb återexpansion av ballongen
- Samtliga modeller ger hög tillförsel av syre när de används tillsammans med den medföljande Oxygenreservoarpåsen, även vid måttliga syreflödes hastigheter.

Ekonomisk

- Materialet ger produkten lång livslängd och har testats för att tåla höggradig desinficering och sterilisering.
- Effektivt integrerad insugnings-/reservoarventil med reservoarpåse säkerställer ekonomisk syreanvändning
- Hopvikbar för kompakt förvaring, sparar plats
- Enkel dekontamination minimerar rengöringstiden och minskar lagerhållningen

* Patent avaktas (USA/Norge)


Laerdal silikonmask med flerfunktions- masköverlägg

Mjukt silikonmaterial som känns behagligt för patienten

- Konstruktion och form underlättar lufttät förslutning
- Patientporten passar kopplingar på 15/22 mm

Unikt flerfunktions- masköverlägg ger ytterligare hjälp i situationer när det är svårt att få masken att sluta tätt.

Flerfunktions- masköverlägg som standard på alla 3/4 och 4/5+ Laerdal silikonmasker. Lätt att ta bort eller sätta på efter behov. Både mask och överlägg är återanvändbara och tål höggradig desinficering och sterilisering.

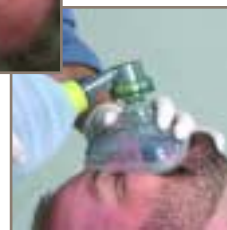

Flerfunktions- masköverlägget kan användas som ytterligare maskstöd eller för att fästa Laerdal silikonmask mot patientens ansikte för att kunna ventileras med båda händerna. Huvudrem finns som tillbehör.



Spädbarn



För patienter som väger 2,5 kg eller mindre.



Barn



För patienter som väger 2,5 till 25 kg.



Vuxen



För patienter som väger över 25 kg.



35 cm H₂O-övertrycksventil som standard på alla barn och spädbarnsmodeller

Silikonballong


ger snabb återexpansion även vid skiftande temperaturer. Utomordentlig känsla för patientens lungmotstånd.

Patientventil

ger maximal effektivitet eftersom den förhindrar återinandning av utandad luft.


Roterande kontakt

tillåter ventilation i olika positioner.

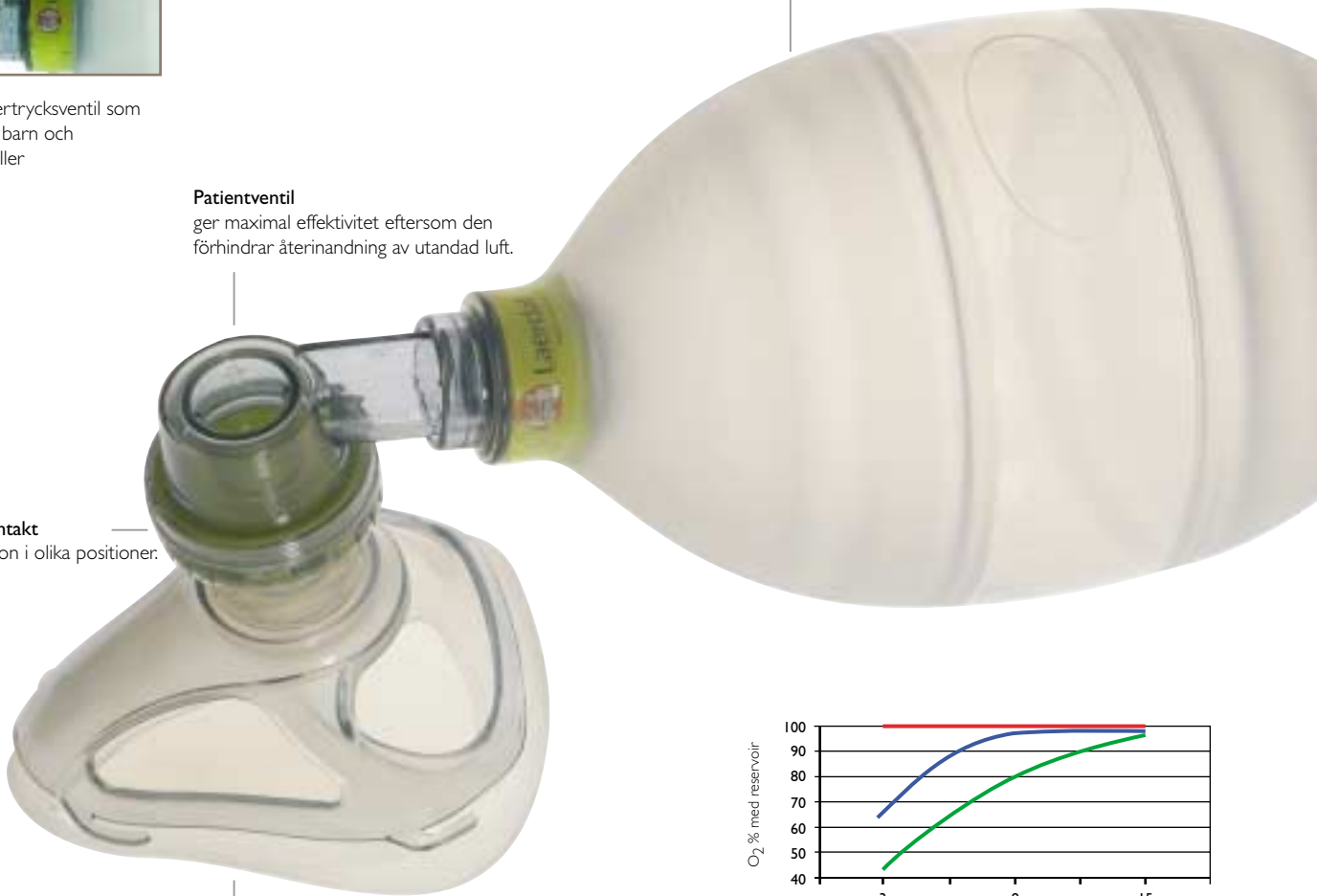

Mask/flerfunktions masköverlägg

transparent utförande gör att mun och näsa syns.

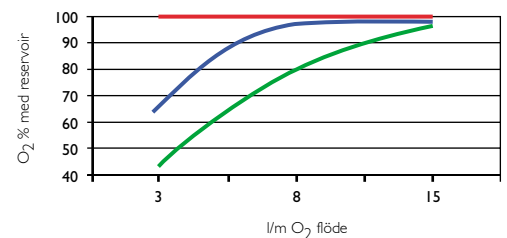

— Spädbarn (20 ml x 60 bpm) — Vuxen (600 ml x 20 bpm)
 — Barn (300 ml x 20 bpm)

Patientventil med lågt motstånd

Patientventilen är konstruerad så att patienter som andas spontant skall kunna inandas upp till 100 % syre med minsta möjliga motstånd

Integrerad insugnings-/reservoarventil

Den fördelaktiga utformningen underlättar säker och effektiv funktion. Mindre antal delar förenklar rengöringen och integrering av insugnings- och oxygenreservoarventilerna i en enda enhet gör att ballongen kan användas med eller utan oxygenreservoarpåse. Ingenting extra behöver köpas till.



Egen märkning

Har du blivit av med din ventilator?

Det behöver inte hända längre! Egen märkning med namnet på din akutsjukvård, enhet eller avdelning på halskopplingen till din Laerdal ventilator av silikon är ett sätt att hindra förlust eller stöld.

Ingen extra kostnad vid köp av minimiantal. Kontakta din Laerdal-representant för mer information.



Dekontamination/sterilisering

Nedanstående rekommenderade metoder ger dig stor flexibilitet:

- Ångautoklavering från 132 °C till 137 °C
- Cidex glutaraldehyd
- Cidex OPA (ortophthalaldehyde)
- Natriumhypoklorit

Förlängningsslang av silikon

Den extra förlängningsslangen av silikon gör att masken kan användas under förflyttning och minskar risken för att endotrakealtuben rubbas tack vare att användaren får "flexibilitet" under ventilationen.





Ballonger

- 870150 Vuxenballong 1 600 ml
- 860150 Barnballong 1 600 ml
- 850150 Spädbarnsballong 1 600 ml

Masker

- 851500 Spädbarnsmask av silikon 0/0
- 851600 Spädbarnsmask av silikon 0/1
- 851700 Spädbarnsmask av silikon 2
- 860220 Barnmask av silikon 3-4 med flerfunktionsmasköverlägg
- 870220 Vuxen silikonmask 4-5+ med flerfunktionsmasköverlägg
- 865200 Flerfunktions masköverlägg (enbart) för mask 3-4
- 872220 Vuxen och Barn Silikon maskset
- 865200 Flerfunktions masköverlägg (enbart) för mask 4-5+
- 870400 Laerdal huvudrem med fästring
- 871300 Fästring för standard huvudrem (visas ej)

Insugnings-/reservoarventil

- 875400 Insugnings-/reservoarventil
- 531901 O₂ reservoarpåse 2,6 liter
- 551901 O₂ reservoarpåse 0,6 liter
- 871950 Skivmembran insugningsventil (pkg 3)

Patientventil

- 560200 Patientventil
- 851250 Patientventil med 35 cm H₂O, övertrycksventil
- 851350 Patientventil med 35 cm H₂O, övertrycksventil och spärrbygel
- 851103 Spärrbygel för övertrycksventil (10-pack)
- 851252 Övertrycksventil, 35 cm H₂O
- 540103 Läppventil
- 540105 Skivmembran patientventil (10-pack)
- 850500 Gaskollektor (YD 30 mm)
- 850900 Manometerkoppling

Väskor

Övriga tillbehör

- 871000 Förlängningsslang av silikon (28cm)
- 850700 Fönsterväska, spädbarn
- 860300 Fönsterväska, barn
- 870600 Fönsterväska, vuxen
- 521100 Vägghållare, fönsterväska barn/spädbarn
- 572000 Vägghållare, fönsterväska, vuxen (visas ej)
- 860420 Kompaktväska, vuxen
- 860410 Kompaktväska, barn/spädbarn
- 870120 Upphängningsögla
- 511700 Väggekonsol
- 875500 Vuxen kompletteringssats – (insugnings-/reservoarventil, 3-4, 4-5+ flerfunktionsmasköverlägg)
- 865500 Barn kompletteringssats – (insugnings-/reservoarventil, 3-4 flerfunktionsmasköverlägg, övertrycksventil 35 cm H₂O)
- 855500 Spädbarn kompletteringssats – (insugnings-/reservoarventil, övertrycksventil 35 cm H₂O)



Norway: LAERDAL MEDICAL AS
P.O. Box 377, N-4002 Stavanger
Tel. +47 51 51 17 00, Fax +47 51 52 35 57
E-mail: laerdal.norway@laerdal.no

Australia: LAERDAL Pty. Ltd. (ABN 47 003 817 490)
23 Edward Street, Oakleigh, Victoria 3166
Tel. +61 3 9569 4055, Toll free 1800 331 565
Fax +61 3 9569 4028, Toll free 1800 635 835
E-mail: customerservice@laerdal.com.au

Benelux: "The Laerdal BeNeLux House"
Dijkstraat 54, NL-5554 PS VALKENSWAARD
Tel. +31 40 208 58 00, Fax +31 40 208 58 02
E-mail: laerdal.benelux@laerdal.no

Canada: LAERDAL MEDICAL CANADA LTD.
151 Nashdene Rd., Unit #45
Toronto, ON, Canada, M1V 4C3
Tel. +1 (416) 298-9600,
Toll free 888/LAERDAL (523-7325)
ou en français (800) 567-9987
Fax +1 (416) 298-8016
E-mail: savelives@laerdal.ca

Denmark: LAERDAL DANMARK
Postbox 225, DK-8600 Silkeborg
Tel. +45 80 333 112, Fax +45 80 333 555
E-mail: laerdal.denmark@laerdal.no

Eastern Europe: LAERDAL C.E. EUROPE
A-1060 Vienna, Mariahilferstr. 1d/1/3
Tel - Fax +43 15877140, Tel. +43 15815927
E-mail: mstam@aon.at

Far East: LAERDAL Singapore Pte Ltd
No. 1 Marine Parade Central
#13-05, Parkway Centre Singapore 449408
Tel. +65 63464259, Fax +65 63467523
E-mail: admin@laerdal.com.sg

Finland: LAERDAL OY
Vattuniemenranta 2, 00210 HELSINKI
Puhelin +358 (0)9-612 99 80,
Telekopio +358 (0)9-692 77 99
E-mail: laerdal.finland@laerdal.no

France: LAERDAL MEDICAL FRANCE
1 rue des Vergers - Bâtiment n° 5 - 69578 Limonest Cedex
Tel. +33 (0)4 72 52 02 52, Fax +33 (0)4 78 35 38 45
E-mail: laerdal.france@laerdal.no

Germany: LAERDAL MEDICAL DEUTCHLAND GmbH
Am Loferfeld 56, 81249 München
Tel. +49 (0)89 / 864 954-0, Fax +49 (0)89 / 864 34 84
E-mail: info@laerdal.de

Italy: LAERDAL ITALIA s.r.l.
Via Piero Gobetti 52/2 int.Z, 40129 Bologna
Tel. +39 051-355587, Fax +39 051-355598
E-mail: laerdal.italia@laerdal.no

Japan: LAERDAL MEDICAL JAPAN K.K.
Shinjuku IS Bldg., 8F
2-13-12, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
Tel. 81-3-5919-2121, Fax: 81-3-5919-2122
E-mail: laerdal.japan@laerdal.co.jp

Malaysia: LAERDAL HOSPILINE Sdn Bhd
12 Jalan Titir 33/25, Section 33, Shah Alam Technology Park,
40400 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,
Tel +60 (3) 5122-7002, Fax +60 (3) 5122-5650
E-mail: sales@hospline.com

New Zealand: LAERDAL NEW ZEALAND Ltd
(GST Number 79-403-636)
PO Box 302664, North Harbour, Auckland 1330
Tel. +61 3 9564 4066, Toll free 0800 523 732
Fax +61 3 9563 3368, Toll free 0800 528 852
E-mail: customerservice@laerdal.co.nz

Portugal: LAERDAL ESPANA, Sucursal em Portugal
Rua da Bela Vista à Graca, no.31 A. Escritorio 9,
1170-054 Lisboa
Tel. (+351)-21-816-6567, Fax (+351)-21-816-6568,
Mob. (+351)-918765367

Spain: LAERDAL ESPANA, S.L.
Manuel Tovar 19, 28034 Madrid
Tel. (+34) 902-291110, Fax (+34) (91)-7291125
E-mail: laerdal.spain@laerdal.no

Sweden: LAERDAL MEDICAL AB
Box 2064, Paviljongvägen 5, 132 02 Saltsjö-Boo
Tel. +46 (0)8-55614610, Fax +46 (0)8-55614619
E-mail: kontakt@laerdal.se

United Kingdom: LAERDAL MEDICAL LTD.
Laerdal House, Goodmead Road, Orpington,
Kent BR6 0HX
Tel. +44 (0)1689 876634, Fax +44 (0)1689 873800
E-mail: customerservice@laerdal.co.uk

USA and Latin America:
LAERDAL MEDICAL CORPORATION
167 Myers Corners Road, P.O. Box 1840
Wappingers Falls, New York 12590-8840
Tel. (800) 431-1055, +1 (845) 297-7770
Fax (800) 227-1143, +1 (845) 298-4545
E-mail: customerservice@laerdal.com

MEDICAL PLASTIC LABORATORY, INC.
P.O. Box 38, 226 FM
116 South Gatesville, Texas 76528-0038
Tel. (800) 433-5539, (254) 865-7221
Telefax (254) 865-8011
E-mail: services@mpltx.com

Modeller	Vuxen			Barn				Spädbarn	
	Basmodell utan mask	Standard	Komplett	Basmodell utan mask	Standard Barn	Standard Yngre barn	Komplett	Basmodell utan mask	Komplett
Kartong	870050	870052	870051	860050	860052	860056	860051	850050	850051
Kompaktväska			870053				860053		850053
Fönsterväska			870055				860055		850055
Ballong	1600 ml	*	*	*					
	500 ml			*	*	*	*	*	*
	240 ml								
Patientventil	*	*	*						
med säkerhetsventil				*	*	*	*	*	*
Mask	0/0						*	*	*
	0/1						*	*	*
	2						*	*	*
3/4 med masköverlägg			*		*	*	*	*	*
4/5+ med masköverlägg		*	*		*	*	*	*	*
Insug./Reservoarventil	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Reservoarpåse 2600	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	600			*	*	*	*	*	*
Bruksanvisning	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande

Viktigt!

Ventilationsutrustningar skall endast användas av personer med tillräcklig utbildning

Fönsterväska



Kompaktväska

Kartong med polypåse



Produkten överensstämmer med de erforderliga kraven i rådets direktiv 93/42/EEG, medicintekniska direktivet.



Laerdal
helping save lives