

# Rolta<sup>®</sup> soft

## Syntetisk polstervadd

Kompression är många gånger en förutsättning för att ett sår ska läka. För att ge en jämn kompression krävs ofta en väl utförd polstring under kompressionsbindan. Anledningen är att exempelvis ett ben har olika form och kan behöva "fyllas ut" för att trycket ska fördela sig jämt. Som utfyllnad används med fördel polstervadd. Rolta soft är ett syntetiskt polstervadd som upplevs både som mjukt och fluffigt.



### Indikation

För polstring under kompressionsbindor och gips.

**Kontraindikationer:**

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

### Egenskaper

Rolta soft är en maskinellt sammansatt polstervadd som är enkel att hantera och upplevs som både mjuk och fluffig av användaren. Rolta soft är genomsläpplig för luft och fukt och har inga absorberande egenskaper vilket gör den hudvänlig. Rolta soft appliceras lätt i mindre försänkningar och hålrum. Man kan applicera polstervadden både på längden och tvären allt efter behov.

Rolta soft absorberar inte röntgenstrålar och behöver ej avlägsnas före röntgenundersökning



Rolta soft appliceras för utfyllnad.

### Material

100% polyester. Rolta Soft är sammansatt på maskinell väg.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Polstervadden kan steriliseras i autoklav vid 121°C i 20 minuter.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Rolta.soft</b>	3 m x 6 cm	932 048	50 st	1 Afp
Osteril, förpackad i ask	3 m x 10 cm	932 049	30 st	1 Afp
	3 m x 15 cm	932 050	20 st	1 Afp
	3 m x 25 cm	932 051	10 st	1 Afp
	3 m x 6 cm	932 043	6 st	8 Afp
	3 m x 10 cm	932 045	6 st	6 Afp
	3 m x 15 cm	932 047	4 st	6 Afp

### Fördelar:

Mjuk och följsam

Flera olika förpackningsstorlekar

Lätt att riva

Behöver inte avlägsnas vid röntgenundersökning