



Bruksanvisning

KIRURGISKT BENVAX - STERILT -

BESKRIVNING

Benvax är en steril icke-resorberbar vax-blandning som består av:

Vitt bivax	PhEur	75 % w/w
Paraffinvax	PhEur	15 % w/w
Isopropyl Palmitat	PhEur	10 % w/w

Benvax är vitt och finns att tillgå i form av 2,5 g massiva rektangulära plattor.

INDIKATIONER

Benvax är avsett att användas för att stoppa blödning från sågade, borrade eller kantstötta benkanter genom att fysiskt plugga igen de benkanaler som innehåller de blödande kapillärena.

TILLÄMPNING

Benvaxet skall värmas med aseptisk teknik till önskad konsistens genom manipulation med fingrarna. Det uppmjukade vaxet anbringas sedan på benytan efter de kirurgiska omständigheterna och vederbörande kirurgs val.

PRESTANDA

Benvax uppnår lokal hemostas av ben genom att det fungerar som ett mekaniskt (tamponad) hinder.

Lindriga inflammatoriska reaktioner har rapporterats i vävnad i implantationsställets omedelbara närhet.

SE KONTRAIKATIONER

Benvax skall inte användas när en snabb nybildning av benvävnad och sammanväxning är önskvärd.

VARNINGAR / FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER / INTERAKTION

Benvax skall användas med försiktighet och allt överflödigt vax skall avlägsnas från operationsområdet.

Benvax kan vara ett rent fysiskt hinder för läkningsprocessen.

Förpackningen med benvax skall öppnas omedelbart före användningen för att minimera risken för kontamination och svår uttorkning.

NEGATIVA REAKTIONER

Negativa reaktioner förknippade med denna produkt är lindriga inflammatoriska reaktioner i vävnaden intill implantationsstället och hämmande av osteogenes. I likhet med alla främmande kroppar kan benvax förvärra en befintlig infektion.

STERILITET

Benvax steriliseras genom strålning. Resterilisera inte vaxet. Använd det inte om förpackningen har öppnats eller skadats. Kasta bort öppnat oanvänt benvax.

FÖRVARING

Rekommenderade lagringsförhållanden: Under 25°C. Benvaxet skall ej utsättas för fukt och direkt värme eller användas efter sista förbrukningsdatum.

SYMBOLER ANVÄNDA VID MÄRKNING



= Engångsbruk



= Användes senast – år och månad



= Sterilt, om inte förpackningen är öppnad eller skadad.
Steriliseringsmetod: Strålning



= CE-märke + identifieringsnummer för Anmält Organ. Produkten uppfyller de väsentliga kraven i Medical Device Directive 93/42/EEC



= Satsnummer



= Se bruksanvisningen

* = Trademark