

# Skin X<sup>®</sup> Hudskyddsring och Absorbent

För bandagering av gastrostomier



**Skin X<sup>®</sup> Hudskyddsring och Absorbent** är avsedda att användas vid läckage från gastrostomi. Båda har slitsar så de kan sättas på plats runt en kateter eller en knapp.

Skin X<sup>®</sup> Hudskyddsring är tillverkad av hydrokolloid och ska sättas på rengjord och torr hud. Hudskyddsringen skyddar huden från kontakt med läckage. Skin X<sup>®</sup> Hudskyddsring kan sitta upp till 2 – 3 dagar, beroende på läckagevolym. Kontrollera bandaget vid stomin ofta och byt vid behov.

Skin X<sup>®</sup> Absorbent är tillverkad av en superabsorbent plastad på yttersidan för att förhindra genomblötning. Absorbenten placeras ovanpå Hudskyddsringen för att absorbera ev läckage och förhindra spridning utanför Hudskyddsringen. Absorbenten byts lämpligast efter matning eller vid behov.

Art.nr.	Skin X <sup>®</sup> Hudskyddsring
203228	Ø 50 mm, hålstorlek 3 mm
203229	Ø 50 mm, hålstorlek 7 mm
203230	Ø 75 mm, hålstorlek 10 mm
203231	Ø 75 mm, hålstorlek 15 mm

30 stycken i varje förpackning

Art.nr.	Skin X <sup>®</sup> Absorbent	Absorption
203223	Ø 50 mm, hålstorlek 3 mm	8 ml
203225	Ø 50 mm, hålstorlek 7 mm	8 ml
203226	Ø 75 mm, hålstorlek 10 mm	10 ml
203227	Ø 75 mm, hålstorlek 15 mm	10 ml

100 stycken i varje förpackning