



Nitab AB
Sanneröd Lerdalen 2
456 91 Kungshamn

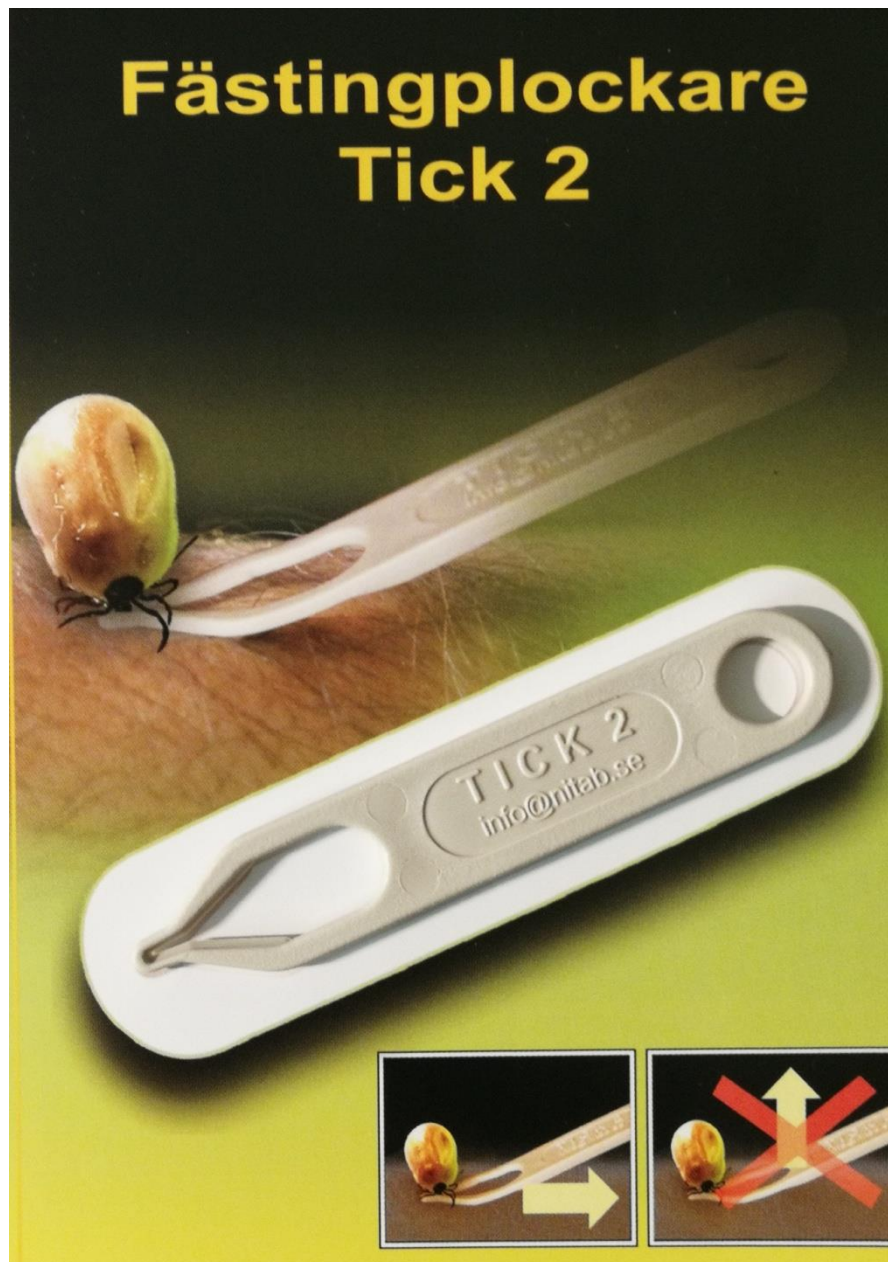

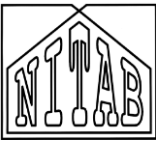

Tick 2 - Instruktion

Viktigt: Avlägsna fästingarna så snart de upptäcks. Då minskar risken att bli smittad av borrelia eller andra fästingburna sjukdomar. Förvara bruksanvisningen tillsammans med din fästingplockare.

Beskrivning:

Fästingplockaren är tillverkad i plast och utan rörliga delar. Den är hygienisk, lättskött och hållbar. Rätt använd så avlägsnas hela fästingen utan att några delar blir kvar av fästingen.

Bruksanvisning:

1. Rengör fästingplockaren Tick 2 före användning.
2. Böj upp spetsen på Tick 2 så att den får samma utformning som den som visas på bilden på framsidan.
3. Håll Tick 2 i 30-45° vinkel mot huden.
4. För Tick 2 ner mot huden så att fästingen kommer in i ”droppålet”.
5. Drag med ett lugnt drag utefter huden in fästingen i den smala spalten på Tick 2.
6. Fullfölj draget och fästingen lossnar från huden men sitter nu fast i spalten på Tick 2.
7. Rengör Tick 2 och bottenområdet efter användningen. Var uppmärksam på eventuella sjukdomssymtom. Sök läkarhjälp alternativt veterinär vid behov!

Exempel på några till människan via fästing överförbara bakterier, virus och andra mikroorganismer: *Borrelia*-arter, *Anaplasma phagocytophilum*, *Francisella*-arter, *Rickettsia helvetica*, *Coxiella burnetii*, *Bartonella*-arter, *Brucella*-arter, *Candidatus Neoehrlichia mikurensis*, *Babesia*-arter och viruset TBE (Tick Borne Encephalitis).