

Snabbbeskrivning

Clearview® Exact Strep A Dipstick

För fullständig beskrivning, se bruksanvisningen som finns i varje förpackning. Läs instruktionerna för provtagning.

Användning av testet

- Testremsor, reagenslösningar, patientprover och kontroller måste ha rumstemperatur 15-30°C (59-86°F) innan analyseringen. Öppna inte paketet med testet förrän analysen ska utföras för att undvika kondensation på membranet.
- Undvik korsförorening genom att inte låta reagensflaskornas topp komma i kontakt med halsprovsticker eller extraktionsrör.
- Skaka om extraktionsreagens- och kontrollflaskorna innan användning.

1. Öppna testets förpackning och placera extraktionsröret i angivet område i arbetsstationen. Tillsätt 3 droppar extraktionsreagent 1 till extraktionsröret. Lösningen ska vara rosa-lila till färgen.


2. Tillsätt 3 droppar extraktionsreagent 2 till extraktionsröret. Blandningen ska nu ändra färg till gult.

3. Placera teststicken med halsprovet i extraktionsröret. Roterar sticken inuti röret och rulla den mot extraktionsrörets insida så att vätskan pressas ut och sugas upp igen av teststicken. Låt stå i minst 1 minut. Extraktionsröret kan stå i upp till 15 minuter i rumstemperatur.

4. Tryck teststicken ordentligt mot rörets insida för att få ut så mycket vätska som möjligt från teststicken. Kassera teststicken.

5. Doppa teststicken i extraktionsröret med pilarna pekande mot provextraktet. Låt provsticken sitta kvar i extraktionsröret. Starta tidtagningen.

6. Läs av resultatet efter 5 minuter. Beroende på antalet organismer på teststicken, kan ett positivt resultat bli synligt redan efter 1 minut. För att bekräfta negativa resultat krävs dock en reaktionstid på 5 minuter. Läs inte av resultat efter 10 minuters reaktionstid.

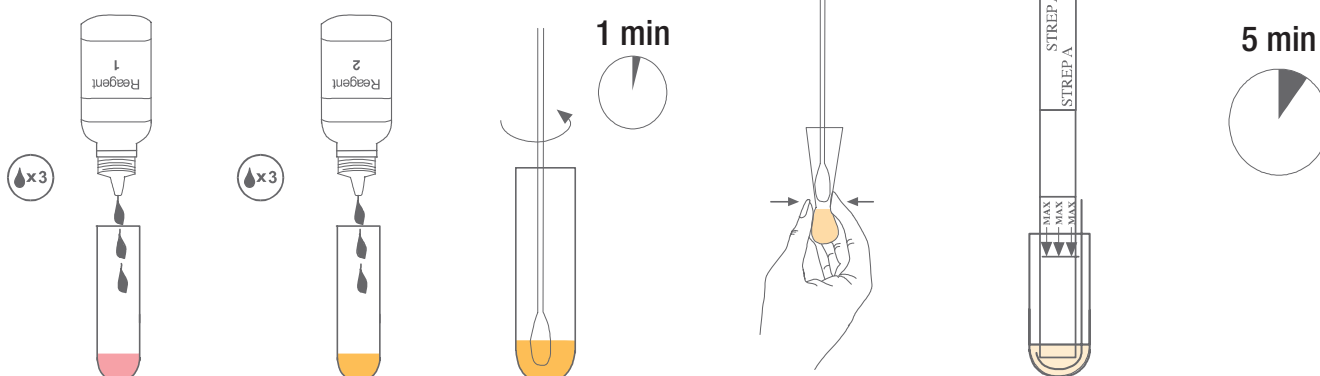

Tolkning av resultat

POSITIVT: Två rosafärgade linjer framträder. Utöver en rosafärgad linje i kontrollområdet, framträder även en rosafärgad linje i testområdet. Linjernas färgstyrka kan variera. Alla färgnyanser i testlinjeområdet (T) skall därför betraktas som positivt svar. Ett positivt resultat indikerar att provet innehåller Streptokock A-antigen.

NEGATIVT: Endast en rosafärgad linje framträder i kontrollområdet. Ingen linje framträder i testområdet. Ett negativt resultat indikerar att provet inte innehåller Streptokock A-antigen eller att koncentrationen av Streptokock A-antigen är lägre än den mätbara nivån.

OGILTIGT: Ingen färgad linje framträder i kontrollområdet. Frånvaro av kontrolllinje är en indikation på felaktig användning eller eventuellt förstörd reagent. Upprepa testet med en ny teststicka. Om problemet kvarstår, kontakta din lokala leverantör.

