

Specialaggregat



Mix-Ad Set blandningsaggregat för antibiotika




Aerosol- och kontaminationsfri överföring av läkemedel enligt dokumenterad undersökning av chefsapotekare J Christensen, Huddinge farmaceutiska avdelning.

Mix-Ad Set är ett säkert system för beredning och administrering av antibiotika och cytostatika. Enkel och säker blandning i samma enhet förhindrar spill. Förhindrar exponering och kontaktallergier hos personal (dokumenterad undersökning). För blandning och överföring av torrs substans eller färdigblandad lösning från ampull till infusionspåse. Möjliggör intermittent infusion för att minimera risken för kemiska tromboflebiter. Patenterad droppregulator ger en säker och konstant dropptakt. Vår unika Rullock och Flowstop eliminerar risken för läckage och kontamination av luer-lockkopplingen. Finns även som PVC-fritt alternativ.

CODAN's över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

Mix-Ad Set blandningsaggregat för antibiotika

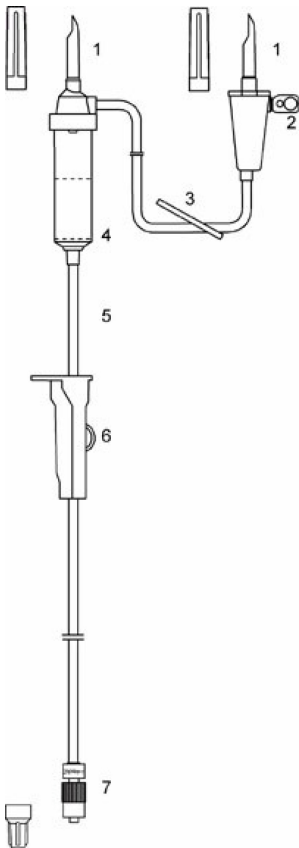

1. Skyddshuv säkerställer steriliteten av aggregatets insida. Insticksspets speciellt utformad för lätt penetration av alla förekommande gummiproppar och plastmembran
2. Luftning med integrerat hydrofobt bakteriefilter 0,2 μ . Luckan skall vara stängd när inte luftning av flaskan behövs.
3. Skjutklämma (vit) öppnas för att låta vätska rinna över i läkemedelsampullen. Stängs när läkemedelsampullens innehåll tömts över i infusionspåsen.
4. Droppkammare med nivåring. Den flexibla droppkammaren möjliggör enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar en noggrann kontroll av den inställda dropptakt. Vätskefilter med 176 mm² verksam filteryta och exakt maskvidd 15 μ
5. Slang av transparent PVC alternativt SRT, \varnothing 3,0x4,1 mm
6. Droppregulator (blå) - patenterad precisionsrullklämma för noggrann inställning av dropptakten. Maximal avvikelse +/- 10%
7. Roterbar luer-lock, Rullock, koppling enl. EN standard. Garanterar säker och tät förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med Flowstop eliminerar risken för läckage, säkerställer steriliteten av aggregatets insida och förhindrar kontamination av luer-lock kopplingen

Bruksanvisning

Utförlig bruksanvisning kan rekvireras från CODAN Triplus AB, Tel: 0300-356 60

EN standarder

DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

För gravitation: DIN EN ISO 8536-4.

För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.

Filtret möter kraven i klass P3, EN standard 143

| Artikel nr. | Produktbeskrivning | Avd fp. | Trpt fp. | Pall fp. | Latex fri | PVC fri | S/OS | Mjukgörare |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|---------|------|------------|
| Blandningsaggregat för antibiotika och cytostatika | | | | | | | | |
| 251068 | Mono-Set blandningsagg m Flowstop NoDEHP | 100 | 400 | 3200 | J | N | S | TOTM |
| 763057 | Quadro-Set fyrgrenat blandningsagg NoDEHP | 15 | 120 | 960 | J | N | S | TOTM |
| Blandningsaggregat för antibiotika och cytostatika Greenline | | | | | | | | |
| 254800 | Mono-Set blandningsagg green line m Flowstop | | 80 | 2880 | J | J | S | NEJ |
| 254804 | Mono-Set blandningsagg green line m SWAN 3-v kran | | 80 | 2880 | J | J | S | NEJ |
| 254806 | Duo-Set 2-grenat blandningsaggregat green line | | 15 | 945 | J | J | S | NEJ |
| 764807 | Quadro-Set green line fyrgrenat blandningsagg | 15 | 120 | 960 | J | J | S | NEJ |
| Blandningsaggregat för antiobiotika i stamlösning | | | | | | | | |
| 251069 | Mono-Set blandningsagg f stamlösning NoDEHP | 20 | 160 | 1280 | J | N | S | TOTM |
| Blandningsaggregat för antibiotika i stamlösning Greenline | | | | | | | | |
| 254802 | Mono-Set blandningsagg green line f stamlösning | | 20 | 1280 | J | J | S | NEJ |
| 254805 | Mono-Set blanddag green line SWAN 3-v kran stamlösn | | 20 | 1260 | J | J | S | NEJ |