



Cederroth Burn Cover

Cederroth Burn Cover skyddar och lindrar smärtan vid mindre brännsår. Sårdynan består av en sval hydrogel som täcker hudens nervändar och hjälper till att lindra smärta. Samtidigt skapas en fuktig miljö vilket motverkar bildning av sårskorpor och ger snabbare sårhäkning. Sårdynan fastnar inte i sår. Burn Cover är också lämplig för mindre skärsår och skrubbsår. Cederroth Burn Cover är blå till färgen för att synas bättre, vilket gör dem lämpliga att använda vid hantering av livsmedel.

Produktfördelar

- Lindrar smärtan
- Ger snabbare sårhäkning
- Fastnar inte i sår

Användning:

- Innan Burn Cover appliceras, kyl brännskadan i minst 20 minuter med Cederroth Burn Gel eller skölj med ljummet vatten
- Använd inte på stora och allvarliga brännsår eller sår som är infekterade eller blöder.
- Byt plåster och rengör såret dagligen.
- Om plåstret torkar ut, fukta det innan det avlägsnas
- Sök medicinsk rådgivning om komplikationer uppstår

Varje ask innehåller 10 sterila plåster (74 x 45 mm).

Sårdynan består av en vattenbaserad hydrogel.

Asken passar i Cederroths Första Hjälpen-stationer

Cederroth Burn Cover	
10 st/ask	
10 ask/SKU	
Storlek ask: 25 x 77 x 106 mm	
REF 901903	
Hållbarhet: 3 år	