


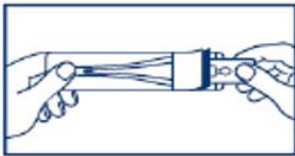
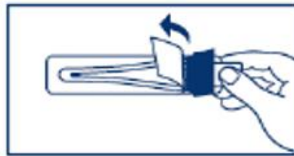



REF	Storlek	
401402	112*34mm	
 		
Material:	Papper och plastfilm i olika lager. Latex-fria.	
Egenskaper:	Engångsskydd termometerskydd för digitala termometrar (orala, rektala, axillära)	
Steril produkt:	Nej	
Hållbarhetstid:	5 år	
MBA/st:	1000	
Avdelningsförpackning/st:	1000	
Transportlåda/st:	10 000	




Placera termometern mellan den blåa och den vita plasten.




Vik tillbaka skyddsfilmen.

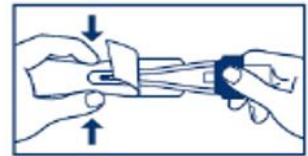


För in termometern i innerskyddet och dra det sakta ur ytterskyddet.

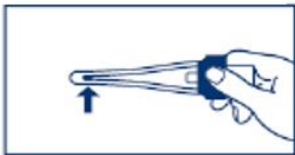

Mät temperaturen.

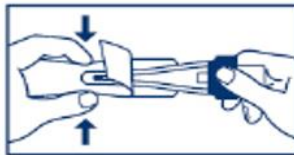

Efter mätning, sätt in innerskyddet med termometer i ytterskyddet.

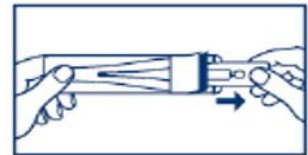

Ta ut den rena termometern och släng de båda skydden.