



0123

QUICKSHIELD Complete Plus

Säkerhetshållare och VACUETTE[®] VISIO Plus provtagningsnål

Handhavandebeskrivning

Användning: QUICKSHIELD Complete Plus kan användas med **VACUETTE**[®] blodprovtagingsrör som ett system till blodprovtagning. Produkten har ett integrerat säkerhetsskydd, som aktiveras och säkrar nålen strax efter provtagning för att undgå stickskador. Det transparenta fönstret hjälper provtagaren att kontrollera att venen är penetrerad. Produkten skall användas av utbildad sjukhuspersonal och som beskrivs i denna handhavandebeskrivning

Produktbeskrivning: De sterila QUICKSHIELD Complete Plus är stycke-förpackade (QUICKSHIELD Säkerhetshållare med förmonterad VACUETTE[®] VISIO Plus provtagningsnål) i en blister förpackning. QUICKSHIELD Complete Plus har ett integrerat säkerhetsskydd som aktiveras och säkrar nålen strax efter provtagning för att undgå stickskador.

Förhållningsregler

Kontrollera QUICKSHIELD Complete Plus före användning. Kontrollera att nålen är monterad korrekt. Använd inte QUICKSHIELD Complete Plus om denna är skadad! Varje QUICKSHIELD Complete Plus som blir kontaminerad med blod, är att betrakta som smittfarligt avfall och bör slängas omedelbart. Efter att venpunktion utförts slängs QUICKSHIELD Complete Plus som en enhet i en godkänd behållare för vassa föremål med hänvisning till laboratoriets gällande regler och procedurer.

Försiktighet

1. Biologiska prover och vassa föremål som används vid provtagning (lancetter, kanyler, luer-adapter och blodprovtagingsset) skall hanteras i enlighet med laboratoriets föreskrifter och procedurer.
2. Uppsök läkare vid direktkontakt med biologiska prover (t.ex. stickskada), då detta kan överföra HIV (AIDS), viral hepatit eller andre smittfarliga sjukdomar.
3. Släng vassa föremål från hudpunktion och blodprovtagingskanyler i godkända behållare för smittfarligt avfall.
4. Använd handskar under venpunktion för att minimera smittorisken.

Förvaring

Förvara hållarna vid 4–36°C.

*Undvik förvaring i direkt solljus. Om hållarna förvaras vid temperaturer, som är högre än den rekommenderade maxtemperaturen, kan det försämra **VACUETTE**[®] hållarna.*

Uppsamling av provmaterial

Läs hela handhavandebeskrivningen innan venpunktion utförs.

ANVÄND HANDSKAR VID VENPUNKTION OCH VID HANTERING AV BLODPROVRÖR FÖR ATT REDUCERA SMITTORISKEN.

1. Blisterförpackningen öppnas och QUICKSHIELD Complete Plus togas ut.

Notera: Blisterförpackningen indikerar produktens sterilitet och integritet. Är blisterförpackningen öppen eller skadad kasseras den.

Notera: Undvik att böja nålen. Använd inte QUICKSHIELD Complete Plus om nålen är böjd.

2. Sätt stas (max. 1 minut).

Desinfisera punktionsstället med ett antiseptiskt medel. Punktionsstället får inte beröras, efter det är desinfiserat!

3. Placera patientens arm nedåt. Tag av skyddet på kanylen. Utför venpunktionen. Vid korrekt penetrering av venen blir fönstret rött av blod.

4. Skjut provröret in i hållaren, så nålventilen perforerar gummiproppen. Provröret fylls med blod.

5. TA BORT STASEN SÅ SNART DET ÄR BLOD I PROVRÖRET. PROVRORETS INNEHÅLL FÅR INTE NÅ UPP OCH BERÖRA PROPP ELLER NÅLVENTIL UNDER PROVTAGNING. Håll röret på plats genom att pressa tummen emot för att säkra komplett vakuum tryck. **Notera:** Skulle det förekomma läckage tas nödvändiga försiktighetsåtgärder till.

När det första provröret är fyllt, och blodflödet stoppar, tas röret försiktigt bort från hållaren. Placera nästa provrör i hållaren, varvid gummiproppen perforeras, och blodet strömmar ned i röret. Notera: Undvik att snurra rören. Fortsätt så tills sista provröret är fyllt och tagits bort från hållaren.

6. Ta bort kanylen från patientens ven. Håll en torr, steril gaskompress på punktionstället, tills blödningen stoppar. Så snart blödningen är stoppad sätt på plåster.


Notera: Efter provtagning vid venpunktion kan det finnas överskottsblod i fördjupningen på provrörets propp. Gör nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika kontakt med blod. Kanylhållaren, som är kontaminerad med blod, betraktas som smittfarlig och skall genast kasseras. Släng den använda kanylen och kanylhållaren i en behållare, som är avsedd för dessa.



Aktivering av säkerhetsskyddet

Genast efter att nålen är borttagen från venen utföres följande procedur för att aktivera skyddet och undgå stickskador.

1. Säkerhetsskyddet kan aktiveras utan risk genom att lägga ett finger mot säkerhetslocket. Fingrarna skall ALLTID hållas BAKOM skyddet.
2. Det hörs ett klick varvid användaren vet att skyddet är aktiverat korrekt, varvid risken för stickskador elimineras.

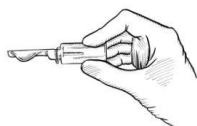

3. QUICKSHIELD Complete Plus slängs i godkänd behållare.

Notera: Frigör inte med tvång eller återaktivera skyddsmekanismen efter att den aktiverats.






Bortskaffande

Generella hygien riktlinjer och regler för korrekt bortskaffande av infekterat material skall följas och iakttas.

Användande av engångshandskar kan reducera smittorisken.

Kontaminerade VACUETTE[®] hållare ska slängas genast efter provtagning i en för ändamålet godkänd behållare.

Symbolförklaring.

-  Referensnummer. Nummret används vid beställning
-  Lot Nummer: batch nummer
-  Symbol for engångsbruk
-  Utgångsdatum
-  Tillverkare