



Suprasorb® Liquacel hjälper till att skydda mot maceration av sårkanten och den omgivande huden.



Suprasorb® Liquacel

Hydroaktivt fiberförband

Egenskaper:

- ✓ Mjukt och smidigt hydroaktivt fiberförband. I kontakt med sårexsudat bildar den absorberande kompressen en gel som säkerställer en direkt kontakt med sårbädden.
- ✓ En fuktig sårmiljö skapas som även kan leda till en autolytisk debridering, vilket understöder läkningsprocessen. Debris och eventuella bakterier som finns i såret binds i fiberförbandet genom gelbildningen och avlägsnas vid förbandsbyte.
- ✓ Det höga vertikala exsudatupptaget skyddar de ömtåliga sårkanterna
- ✓ Förbandet kan enkelt klippas till och anpassas efter sårets storlek.

Indikationer:

- ✓ Förbandet är lämpligt att använda vid olika sårtyper, såsom lätt, medel och rikligt vätskande sår, såväl ytliga som djupa, t.ex. Kroniska sår, t.ex. bensår, dekubitus och diabetessår. Akuta sår, t.ex. lacerationer, skärsår och skrubbsår 2:a gradens brännskador. Traumatiska sår och sår som är benägna att blöda, som t.ex. efter kirurgisk eller mekanisk debridering. Postoperativa sår, t.ex. tagställen Andra sekundärläkande sår

Omlägningsfrekvens

- ✓ Beroende på såret och sårets vätskemängd men som mest med 7 dagars mellanrum.

Material:

- ✓ Innehåller cellulosae/cellulosaetyl-sulfonat fiber

Förpackningar:

- ✓ Produktförpackning av cellulosa och polyetylen
- ✓ Avdelningsförpackning av cellulosa
- ✓ Transportkartong i wellpapp av cellulosa
- ✓

Förvaring och hållbarhet:

- ✓ Förvaras rent och torrt i rumstemperatur skyddat från solljus (inte över 25°)
- ✓ Hållbar i originalförpackningen i 3 år från tillverkningsdatum

Produktklassificering:

- ✓ CE-märkt enligt Medicinska Direktivet som Klass IIb-produkt
- ✓ Testad enligt EN-Standard 13726-1

Avfallshantering:

- ✓ Produkten hanteras som brännbart avfall
- ✓ Produktförpackning hanteras som brännbart avfall
- ✓ Avdelningskartong källsorteras eller hanteras som brännbart avfall
- ✓ Transportkartong källsorteras som kartong enligt lokala rutiner

Finns både som kompress eller tamponad.

Pos nr	Storlek	Lev art nr	Avd fp	Trp fp
	5x5cm	33 435	10	100
	10x10cm	33 436	10	100
	15x15cm	33 437	5	50
	Tamponad			
	2 x 45cm	33 438	5	50



1

Skydd och säkerhet, för såret och sårkanterna

Snabb vertikal absorption av exsudat och överföring till ett sekundärt förband, t ex Suprasorb P. Exsudat hålls borta från sårkanterna. Hjälper till med tillslutning av såret genom att skydda sårkanterna.

2

Optimal exsudat hantering

Bildar en sammanhängande gel vid kontakt med sårvätska. Binder exsudat, debris och bakterier i gelén. Täcker sårbädden helt, utan att fastna i såret.

3

Enkel att avlägsna i ett stycke

Minskar risken att förbandsrester lämnas kvar i såret. Snabba förbandsbyten; förbandet avlägsnas i ett stycke.

Enkla och atraumatiska förbandsbyten; underlättar och premierar sårhäkningsprocessen.

Bruksanvisning:

1. Förberedelse av såret:

Rengör omsorgsfullt såret, debridera, t.ex. med Debrisoft®. Området runt såret ska vara torrt och rent.

2. Applicering av sårförbandet:

- Anpassa förbandets storlek efter sår storlek. Klipp till produkten en bit utanför sårområdet.
- Placera kompressen på den fuktiga sårbädden. Förbandet ska överlappa sårkanterna med ca 1 cm. Fukta förbandet över sårområdet med fysiologisk koksaltlösning vid mindre vätskande sår.
- Tamponera försiktigt djupa sår till 85 % med tamponadmaterialet och låt det överlappa sårkanterna med ca 2,5 cm.
- Fixera produkten med ett lämpligt fuktighetsbevarande sekundärförband.

3. Förbandsbyte:

Hur ofta Suprasorb® Liquacel behöver bytas fastställs utifrån sårets status av behandlande läkare, dock allra senast efter 7 dygn. Produkten kan avlägsnas i ett stycke, t.ex. med hjälp av en steril pincett. För att inte störa läkningsprocessen bör man vid mindre vätskande sår fukta förbandet före förbandsbytet. Eventuella gelrester i sårbädden ska tas bort vid sårrengöringen. Spola rent ordentligt, särskilt i sårkaviteter.

Försiktighetsåtgärder:

Om det föreligger kliniska tecken på infektion måste den för behandlingen ansvariga läkaren bestämma om det krävs ytterligare behandlingsåtgärder. Suprasorb® Liquacel skall ej användas som kirurgisk tamponad vid kraftigt blödande sår eller inne i slutna sår.