




Bakterie- och vätskeavvisande

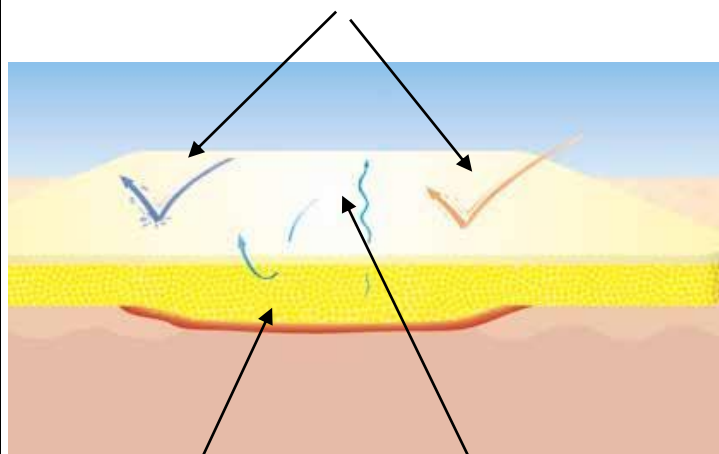

När exsudat absorberas sväller hydrokolloiden och bildar en gel som binder exsudat och debris

Överskott av vatten förångas

Suprasorb® H

NEW

- hydrokolloidförband

Nu kommer vi med ett nytt uppdaterat hydrokolloidförband.

En bättre produktkvalitet och nya indikationer. Suprasorb H thin är tunnare och smidigare (0,05mm tunnare) och kan absorbera 3 gånger mer vätska än sin föregångare.

Egenskaper:

- ✓ Ett semipermeabelt hydrokolloidförband. Skapar en idealisk sårmiljö samtidigt som den ger en god absorption av sårsekret.
- ✓ Ogenomtränglig för bakterier och vatten.
- ✓ Bandaget är mycket flexibelt och följer kroppens konturer. Den är självhäftande och lätt att använda.
- ✓ Kan bytas utan smärta och fastnar inte i såret. Det är patientvänligt och mjukt mot huden.
- ✓ Kan användas under långa behandlingar utan att skada omgivande hud. Inga allergiska reaktioner har påträffats.
- ✓ Förbandet är ekonomiskt att använda då få förbandsbyten krävs, i jämförelse med konventionell behandling.

Indikationer:

Suprasorb H	Standard	Thin
Trycksår lätt vätskande	X	X
Trycksår måttligt vätskande	X	
Bensår lätt vätskande	X	X
Bensår måttligt vätskande	X	
Ytliga första och andra gradens brännskador Ny indikation	X	X
Tagställen	X	X
Transplantationsställen för hud	X	X
Diabetssår	X	X
Postoperativa sår Ny indikation	X	X
Skrubbsår Ny indikation	X	X

Observera att thin är endast avsett för lätt vätskande sår.

Omlägningsfrekvens:

- ✓ Beroende på sårets vätskemängd och eventuellt primärförband men byts efter 5-7 dagar.

Material:

- ✓ Innehåller hydrokolloidlager med CMC (carboxymethylcellulose) täckt med polyuretanfilm.

Förpackningar:

- ✓ Produktförpackning av cellulosa och film
- ✓ Avdelningsförpackning av cellulosa
- ✓ Transportkartong i wellpapp av cellulosa

Förvaring och hållbarhet:

- ✓ Förvaras torrt och rent i rumstemperatur (inte över 30°)
- ✓ Hållbarhet 3 år från tillverkningsdatum

Produktklassificering:

- ✓ CE-märkt enligt Medicinska Direktivet som Klass IIb-produkt



Bruksanvisning

1. Förberedelse av såret:

Rengör omsorgsfullt såret. Omgivande hud ska vara ren och torr.

2. Applicering av sårförbandet:

- Ta bort skyddsfilm.
- Lägg Suprasorb®H-hydrokolloidförbandet på såret. Undvik beröring av häftytan.
- Släta till förbandet över såret och tryck fast det vid kanterna.

3. Förbandsbyte:

- Tiden mellan förbandsbyten fastställs av behandlande läkare utifrån sårets tillstånd.
- När en fällning blir synlig på gelkudden och när denna närmar sig förbandskanten bör förbandet bytas. Lämpligt är att byta förbandet när ca 1 cm återstår innan fällningen når förbandskanten. Vid kraftigt vätskande sår kan förbandsbytet göras en gång om dagen. Vid måttligt vätskande sår kan det ske med flera dagars mellanrum.
- När det inte går att helt och hållet avlägsna alla nekrotiska vävnadsrester från ett sår, måste man vid användning av Suprasorb®H byta förbandet oftare.

Försiktighetsåtgärder:

- ✓ Vid infektion ska man inte använda Suprasorb® H.
- ✓ Om Suprasorb®H används på venösa bensår, ska en ordinerad kompressionsbehandling fortfarande genomföras.
- ✓ Vid användning på trycksår måste den sedvanliga behandlingen fortfarande genomföras.
- ✓ Hydrokolloidförbandet ska förvaras torrt och liggande.
- ✓ Vid känd överkänslighet eller allergi mot ett eller flera innehållsämnen i hydrokolloidförbandet (t.ex. karboximetylcellulosa) får produkten inte användas.

Avfallshantering:

- ✓ Produkt hanteras som brännbart avfall
- ✓ Produktförpackning hanteras som brännbart avfall
- ✓ Avdelningsförpackning källsorteras eller som brännbart avfall
- ✓ Transportkartong källsorteras

Nyhet!

Suprasorb H Thin **NEW** är tunnare och kan absorbera 3 gånger mer vätska än sin föregångare.



Finns i standard, tunn, border och sacrum.

Storlek	Lev art nr	Avd fp	Trp fp
10x10cm, Standard	108 830	10	660
15x15cm, Standard	108 831	5	50
20x20cm, Standard	108 832	5	50
5x5cm, Tunn	108 860	10	1650
5x10cm, Tunn	108 861	10	480
5x20cm, Tunn	108 862	10	250
10x10cm, Tunn	108 863	10	720
15x15cm, Tunn	108 864	5	50
20x20cm, Tunn	108 865	5	50
14x14cm, Border	108 866	5	200
14x16cm, Sacrum	108 867	5	200

