

# Actimove® Physiopack®

## Gelkompress för kyl- och värmebehandling

Actimove Physiopack är en återanvändningsbar gelkompress för extern varm eller kall applicering vid stukningar, sträckningar, inflammation eller stela muskler.

Actimove Physiopack behåller sin följsamhet under kylanvändning och ger en pålitlig jämn distribution av gelen.

- Säkerställer effektiv kyla/värme behandling under hela rekommenderade behandlingstiden om 20-30 minuter.
- Enkel att kyla i fryns eller kylskåp.
- Går snabbt att hetta upp i mikrovågsugn eller hett, icke kokande, vatten.
- Tillgänglig i tre storlekar.

- Den återanvändningsbara förpackningen kan enkelt rengöras med vatten och vid behov torkas av med desinfektionsmedel.
- För den mindre och mellanstora gelkompressen medföljer ett fleecefodral som skyddar huden.

- Skydda huden genom att placera en duk eller handduk mellan gelpaketet och huden.
- Överskrid inte användningstiden om 20-30 minuter.
- Övervaka vid användning hos barn.
- Svälj inte gelen. Kontakta läkare vid oavsiktlig förtäring.
- Använd inte om kontraindicerat.

### Användningsområden inkluderar:

#### Kylbehandling

- Akuta mjukdelsskador
- Lokala inflammationer (t ex sen-, slemsäcksinflammation)
- Kroniska sjukdomar (t ex artros, ledgångsreumatism)
- Muskelkramper
- Rehabilitering efter mjukdelsskador

#### Värmebehandling

- Muskelsmärta
- Subakuta inflammationer (inkl artrit)
- Stelhet i mjukdelar



### Beställningsinformation

Art Nr.	Storlek	Förpackning	Antal i transportkartong
72075-15	7.5 cm x 10 cm	1 x 4 Gelpaket / 1 fleecefodral	12x4
72075-16	12 cm x 29 cm	1 Gelpaket / 1 fleecefodral	12
72075-17	16 cm x 26 cm	1 Gelpaket	12



**essity**

Actimove®,  
an Essity brand

07/2021  
5021\_0721

Essity Hygiene and Health AB  
SE-405 03 Göteborg

www.essity.se  
Tel: 031-746 15 00  
kundservice.se@essity.com