



Sanifix benfixering för urinpåse

Avsedd för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Fixering för urinpåse passar både höger och vänster ben och kan även fixeras på låret eller vaden. För fixering vid underbenet lämpar sig dom mindre storlekarna bäst. Färgkodad.

Bruksanvisning / handhavande: Storleken mäts runt låret alternativt vaden. Rätt storlek är viktig för att få önskad effekt och att urinpåsen skall sitta på plats även då påsen är full. Placera urinpåsen i den sydda fickan med avrinningsröret genom öppningen i fickans underkant.

OBS! Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion.

Benämning	Sanifix benfixering för urinpåse					
Varumärke	Sanifix					
Sanicare art nr	9100	9101	9102	9103	9104	9105
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
Färgkod	Röd	Gul	Blå	Brun	Grön	Vit
Benöppning, cm	20-30	24-39	36-55	40-70	65-95	75-105
Vikt / produkt, g	12	16,5	23,5	28	30	35
Antal / fp, st	3					
Material	76% Polyamid, 24% Elastan					
Tvättråd						
Antal tvättar	Ca 25 tvättar (normal hushållstvätt)					
Kasseras	Brännbart avfall, sorteras efter lokal anvisning					
Förvaring	Rumstemperatur					
Övriga information	Produkt innehåller inte PVC eller Latex					



Produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.



Tillverkare:
Sanicare AB
Skeavägen 15
311 44 Falkenberg



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 (www.oeko-tex.com)
OEKO-TEX® innebär att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt.



Se till att sömmar och material är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger hög värme



sanicare