


# DASH 3® ENFit™

## ENTERAL SPRUTA



### Administration av läkemedel via DASH3 ENFit spruta


DASH 3® ENFit spruta är designad för att användas till medicinering, bolusmatning eller till spolning med vatten. Sprutorna är osterila efter första användningen och de får inte användas till mer än en patient. Denna instruktion gäller för administration av läkemedel till patienter i hemmet.

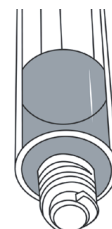

### FYLL SPRUTAN MED HJÄLP AV ETT UPDRAGNINGSRÖR



Exempel på uppdragningsrör

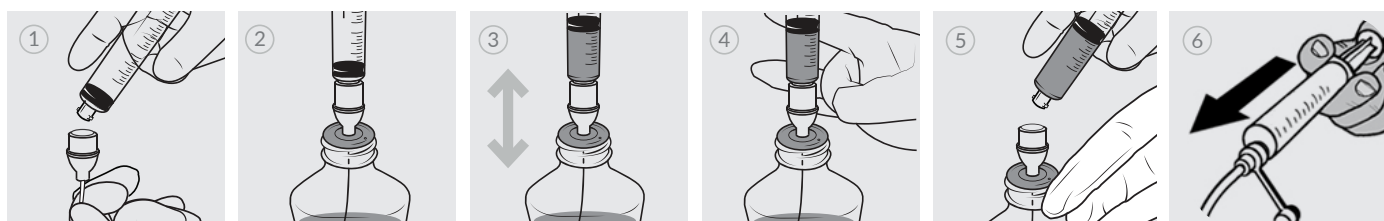

**Steg 1** Koppla ett ENFit uppdragningsrör till sprutan.

**Steg 2** Sätt ner uppdragningsröret genom existerande flaskadapter eller direkt ner i flaskan.

**Steg 3** Snurra sprutan för att ta bort luftbubblor och dra sedan upp önskad mängd läkemedel.

**Steg 4** Ta bort uppdragningsröret från sprutan och slå lätt för att få bort överbliven medicin.

**Steg 5** Se till så att det inte är några luftbubblor i sprutan.


**Steg 6** Administrera läkemedel via en ENFit medicinport (sond eller sondmatningsaggregat).

### FYLL SPRUTAN FRÅN EN MEDICINKOPP

Om man inte har tillgång till ett uppdragningsrör kan man administrera medicinen direkt från en medicinkopp. Vi rekommenderar då att man använder en stegadapter men det går även att använda sprutan utan stegadapter. OBS. detta är inte det rekommenderade förstahandsalternativet.



Exempel på stegadapter

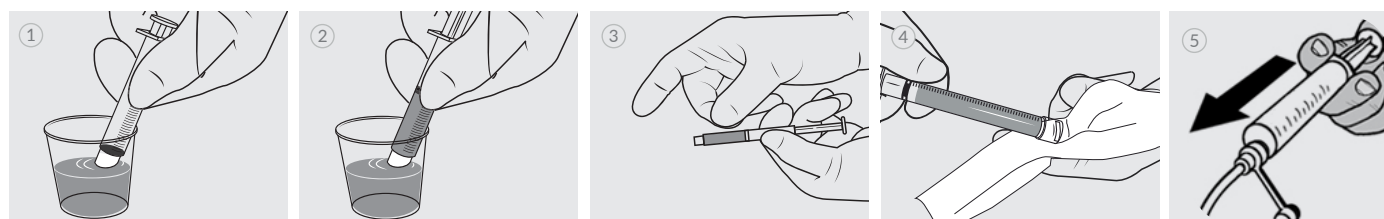

**Steg 1** Häll upp medicin i en kopp och sätt ner sprutan. Tänk på att bereda en liten större mängd medicin än det som behöver administreras.

**Steg 2** Snurra sprutan och dra upp önskad mängd medicin.

**Steg 3** Knacka lätt på sprutan för att få bort bubblor.


**Steg 4** Om sprutan används utan stegadapter, torka bort eventuella överblivna medicinrester från kopplingen.

**Steg 5** Administrera läkemedel via en ENFit medicinport (sond eller sondmatningsaggregat).

**OBS. Det är alltid en läkares slutgiltiga ansvar att instruera patienten så att denne får rätt dos.**

# ENFit™ Flergångsspruta (DASH 3® Plus)

## RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

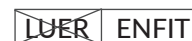

ENFit flergångsspruta (DASH 3® Plus) är osterila efter första användningen och de får inte användas på fler än en patient.



1. Rengör sprutan direkt efter användning. Undvik att låta mat eller medicinrester blir kvar och torka in i sprutan då det förkortar sprutans livslängd.




2. Dra ut hela kolven från hylsan. Det är inte nödvändigt att ta av den svarta gummipackningen från kolven.

3. Tvätta båda delarna (kolv och hylsa) grundligt för hand med varmt vatten och diskmedel (Yes handdiskmedel eller liknande) för att få bort alla eventuella mat eller medicinrester.

4. Skrubba/skrapa **inte** någon del av sprutan, eftersom detta kommer förkorta dess livslängd.

5. Skölj kolv och hylsa noggrant under kallt rinnande kranvatten eller i en skål med rent vatten i.

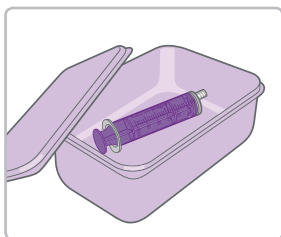

6. Skaka ur överskottsvatten och låt därefter samtliga delar lufttorka.

7. Torka **inte** delarna med papper, handduk eller liknande, eftersom detta kommer förkorta livslängden på sprutan.

8. Montera ihop kolv och hylsa när de torkat och förvara sprutan på en ren och torr plats. Undvik att förvara sprutan i direkt solljus.

9. Sprutorna kan användas upp till 7 dagar i följd.



### De ska kastas när antingen:

- Graderingen blir otydlig eller börjar försvinna.
- Kolven blir trög att använda.
- Sprutan har använts i 7 dagar.

Kontakta sjukvårdspersonal innan användning av ENFit flergångsspruta (DASH 3® Plus).

ENFit flergångsspruta (DASH 3® Plus) distribueras av Nutricia.