



KD-*PENOFINE*

Pennkanyle



KD-PENOFINE sterila pennkanyler för engångsbruk är kanyler avsedda att anslutas till kompatibla insulinpennor för insulinadministrering inom ramen för ett behandlingsprogram för diabetes mellitus.

Bruksanvisning:

Kontrollera kompatibiliteten mellan pennkanylen och insulinpennan – en lista över kompatibla pennor finns i tabellen nedan.

Kontrollera att produkten och förpackningen är hela före användning och att utgångsdatumet inte passerats.

Använd inte produkten om den individuella förpackningen redan är öppnad eller skadad då enheten i så fall inte längre är steril.

Använd inte produkten efter utgångsdatumet.

Använd produkten omedelbart när den individuella förpackningen öppnats.

Anslut pennkanylen till insulinpennan.

Kontrollera att insulinläkemedlet kommer ut ordentligt inför varje injektion. Ha alltid pennkanyler i reserv om de behöver bytas ut.

Använd den teknik som rekommenderas av din läkare vid administrering. När pennkanylen har förts in trycker du ner injektionsknappen helt. Var noga med att inte ändra vinkeln på insulinpennan. Om du märker att läkemedlet droppar när du dragit ut kanylen från huden ska du hålla den införd längre nästa gång, med samma dosering.

När injektionen är klar tar du bort kanylen från pennan och kasserar den i en lämplig behållare i enlighet med gällande förordningar och riktlinjer.

Varningar/anmärkningar:

Fråga din läkare vilken kanyllängd som är lämpligast och vilken injektionsteknik som ska användas.

Följ alltid läkarens anvisningar.

Personer med nedsatt mental/fysisk förmåga bör få hjälp att använda produkten.

Pennkanylen är endast avsedd för engångsbruk – använd alltid en ny kanyl vid varje injektion och kassera den direkt efteråt.

Återanvändning av denna engångsprodukt kan ge upphov till infektioner eftersom en använd kanyl inte längre är steril. Dessutom kan injektioner med en redan använd kanyl vara mer smärtsamma då smörjmedlet försvunnit och spetsen är deformerad.

Förvara aldrig insulinpennan med en kanyl monterad då den monterade kanylen skapar en öppen kanal till insulinläkemedlet i ampullen – insulinläkemedlet kan förändras (t.ex. kristallisering) eller förorenas, luft kan komma in i ampullen och doseringen kan bli felaktig.



Lista över kompatibla pennor:

Owen Mumford	AutoPen®	✓
	AutoPen® 2	✓
DONGBAO	YpsoPen®	✓
Novo Nordisk	NovoPen® 3	✓
	NovoPen® 4	✓
	NovoPen® Junior	✓
	NovoMix®30 FlexPen®	✓
Ypsomed	YpsoPen®	✓
BD Medical	Puregon Pen®	✓
Bioton	GensuPen2	✓
	GensuPen Improve	✓
Eli Lilly	Luxura HumaPen®	✓
	HumaPen®	✓
	HumaPen® Ergo	✓
	Saline KwikPen™	✓
	Luxura HD HumaPen®	✓
	HumaPen® Ergo II	✓
Sanofi Aventis	OptiPen® Pro 1	✓
	TactiPen®	✓
	Sanofi Aventis Lantus	✓
Lantus	Lantus® SoloStar®	✓
Gan & Lee	GanLee Pen®	✓

Datum för senaste ändring: 2019-09-17 50210

Symboler:

CE 0123

STERILE EO

Steriliserad med etenoxid



Ska inte återanvändas



Ska inte användas om förpackningen är skadad



Förvaras torr



Ska hållas borta från solljus



Temperaturgräns

REF

Katalognummer

LOT

Satskod



Tillverkningsdatum



Bäst-före-datum



Tillverkare



KD Medical GmbH Hospital Products, Charlottenstrasse 65, 10117 Berlin, Germany

