


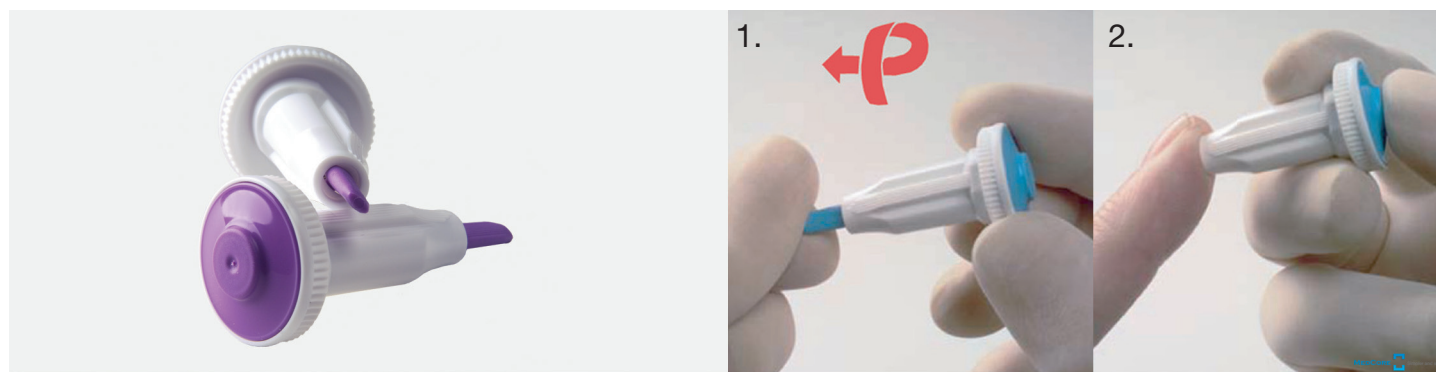

Haemolance Plus säkerhetslansett - finns med blad eller nål

Välj rätt lansett för kapillärprovtagningens ändamål.

1. För att avlägsna skyddstaven, vrid och dra samtidigt (ett varv).

2. Placera lansettkanten längs med nageln (ca 2 mm ifrån). Tryck på den färgade knappen.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR:

- Haemolance Plus är enkel och säker för både personal och patient
- Haemolance Plus är ergonomisk, snabb och enkel att använda
- Haemolance Plus kräver minimal instruktion
- Haemolance Plus är en engångsprodukt
- Nålen/bladet fjädrar tillbaka efter användning

G står för Gauge. Gauge är ett mått på nålens diameter. Ju högre Gauge ju finare, tunnare nål är det.

Orderinformation

Art.nr.	Färg	Namn	Nålstorlek	Stickdjup	St./förp	Trp förp.
7365	Rosa	Paediatric	Blad	1,2 mm	200st	10 boxar
7375					100 st	20 boxar
7364	Lila	Max Flow	Blad	1,6 mm	200 st	10 boxar
7374					100 st	20 boxar
7362	Grön	Normal Flow	21G	1,8 mm	200 st	10 boxar
7372					100 st	20 boxar
7361	Mörkblå	Low Flow	25G	1,4 mm	200 st	10 boxar
7371					100 st	20 boxar
7360	Ljusblå	Micro Flow	28G	1,6 mm	200 st	10 boxar
7370					100 st	20 boxar
7363	Gul	High Flow	18G	1,8 mm	200 st	10 boxar
7373					100 st	20 boxar

Hemolance Plus säkerhetslansett - finns med blad eller nål Välj rätt lansett för kapillärprovtagningens ändamål.



EXEMPEL PÅ OLIKA FLÖDEN VID PROVTAGNING MED FÖLJANDE SÄKERHETSLANSETTER:

- Micro Flow, ljusblå nål, djup 1.6 mm 28G är mycket skonsam och ger ett litet flöde, räcker oftast till t.ex. blodsocker, HbA1c och CRP
 - Normal Flow, grön nål, djup 1.8 mm 21G, är mycket väl lämpad till Hb, med ett flöde på ca. 100 – 150 µL
 - Max Flow, lila blad, djup 1.6 mm. Bör ge ett flöde på ca. 400 µL eller mer. Med fördel lämpad för PK - prover, microrör mm.
 - Paediatric, rosa blad, djup 1.2 mm. Den är ett alternativ när man tar kapillärt på små barn, t.ex. i stortån, i fingret, hälen eller annat. Flöde på ca. 200 µL eller mer. Flödet beror mycket på om barnets provtagningsställe är uppvärmt eller ej.
- Följande nållansetter är också automatiska säkerhetslansetter men kan numera ersättas av Micro Flow resp Max Flow.
- Low Flow, mörkblå nål, 1.4 mm 25G. Kan med fördel för patienten bytas mot Micro Flow.

G står för Gauge. Gauge är ett mått på nålens diameter. Ju högre Gauge ju finare, tunnare nål är det.

Orderinformation

Art.nr.	Färg	Namn	Nålstorlek	Stickdjup	St./förp	Trp förp.
7365	Rosa	Paediatric	Blad	1,2 mm	200st	10 boxar
7375					100 st	20 boxar
7364	Lila	Max Flow	Blad	1,6 mm	200 st	10 boxar
7374					100 st	20 boxar
7362	Grön	Normal Flow	21G	1,8 mm	200 st	10 boxar
7372					100 st	20 boxar
7361	Mörkblå	Low Flow	25G	1,4 mm	200 st	10 boxar
7371					100 st	20 boxar
7360	Ljusblå	Micro Flow	28G	1,6 mm	200 st	10 boxar
7370					100 st	20 boxar
7363	Gul	HighFlow	18G	1,8 mm	200 st	10 boxar
7373					100 st	20 boxar